


# Cutimed® HydroControl

Multibegåvad sårläkning

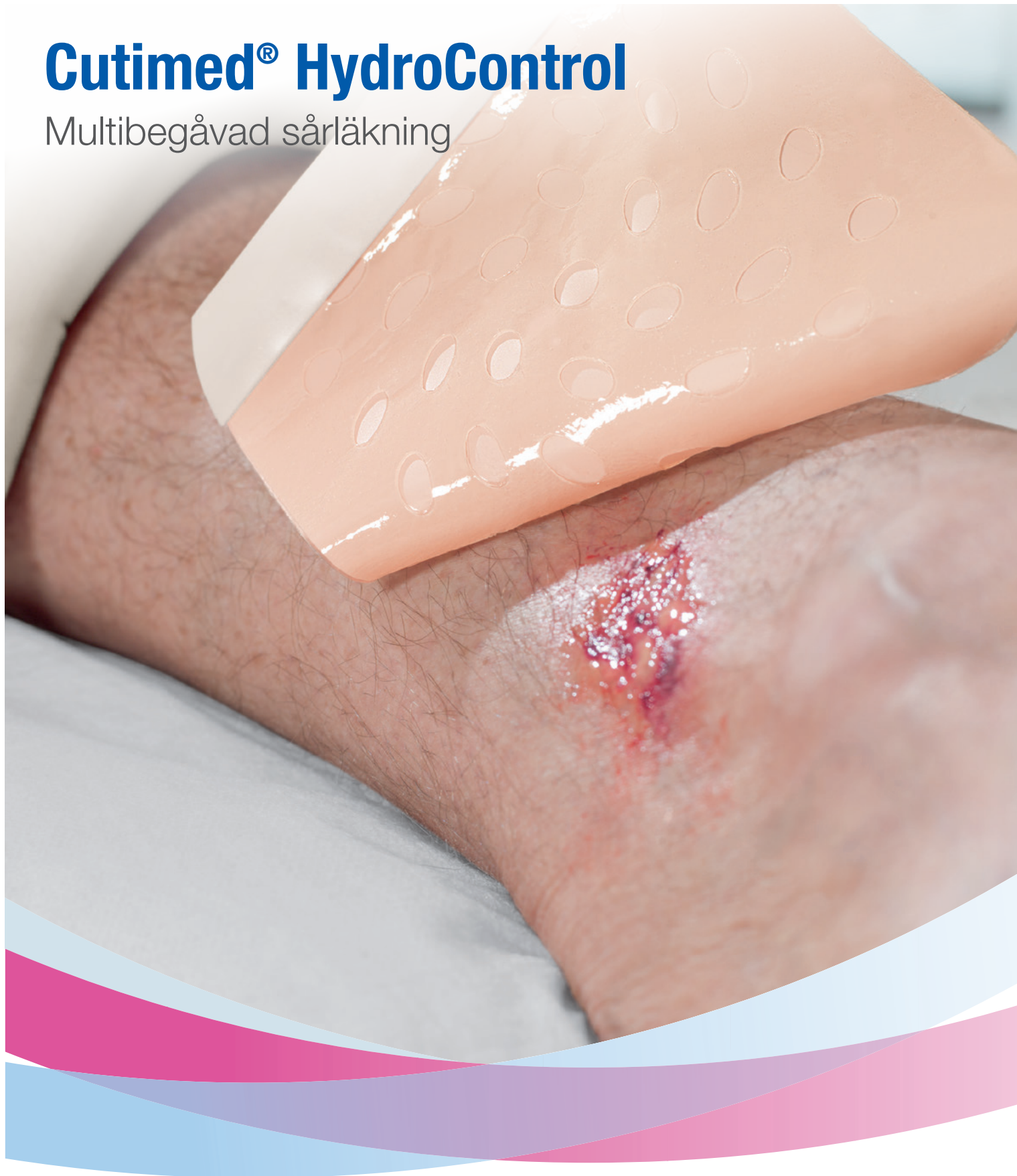

**Cutimed®**

# Cutimed HydroControl

## ett nytt sätt att hantera sår


### Fyra funktioner

Cutimed HydroControl är resultatet av ett nyskapande sätt att kombinera fyra olika funktioner för att få fram ett förband som kan hantera kroniska/stagnerade sår som gått i "lås".



#### Mycket god hantering av vätska

Säker behandlingslösning eftersom sårvätskan absorberas vertikalt och hålls kvar inne i förbandet.

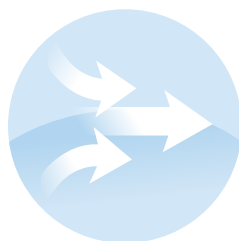


#### Mycket god potential för sårstimulering

Stimulerar och främjar autolytisk debridering genom osmos.




#### Optimal fuktbalans

Kombinationen av Flexipore-tekniken, polyuretanfilmen och den hydropolymerbaserade gelmatrisen skapar en optimal miljö för sårhäkning.

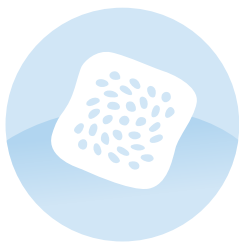

#### Innovativ design

Förbandet är tunt, klippbart och enkelt att applicera. Kombinerar hög användarkomfort med unika produkttegenskaper.

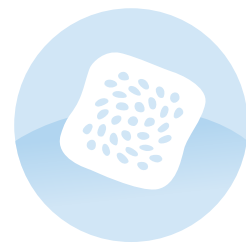


## Det unika finns i detaljerna

Hemligheten bakom **Cutimed HydroControl** är en innovativ kombination av en polyuretanfilm med mycket goda andningsegenskaper och en hydroaktiv gelmatris av hydropolymer. Interaktionen mellan dessa två komponenter och flexipores-tekniken resulterar i en utmärkt vätskehantering och skapar förutsättningar för en optimal sårmiljö.


• **Gelmatris av hydropolymer**

• **Extra tunn polyuretanfilm**

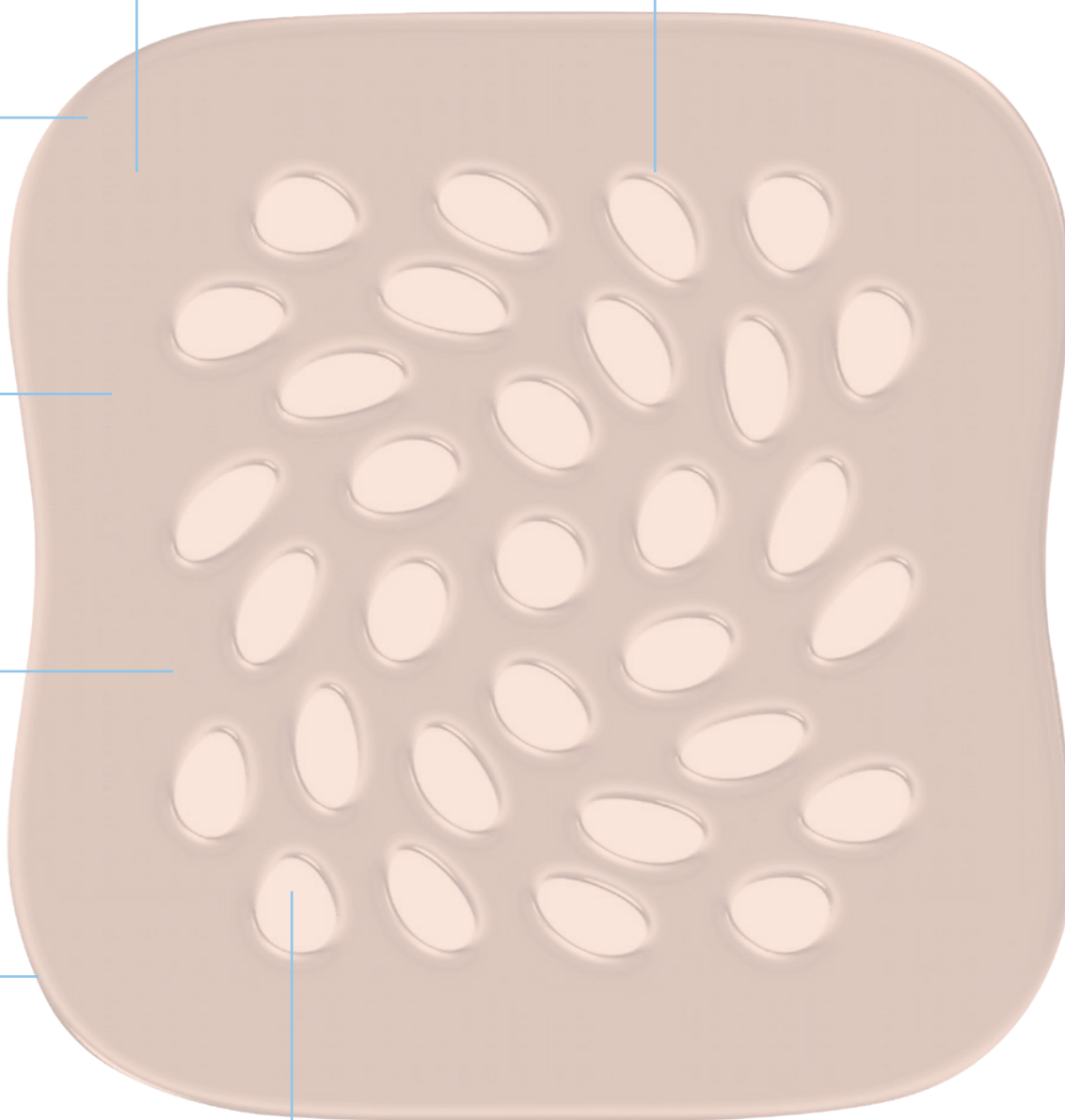

• **Flexipores**

# Sårstimulering – nyckeln till en lyckad sårhäkning

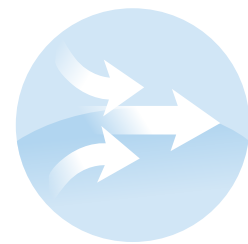


## Skapa ideala läkningsförhållanden

**Cutimed HydroControl** verkar genom den fysiska principen osmos. När förbandet absorberar sårvätska ökar osmolaliteten i sårbedden. Detta stimulerar tillströmningen av ny vätska från den omgivande vävnaden till sårbedden vilket främjar autolytisk debridering. Förbandets fyra funktioner skapar optimala förutsättningar för vävnadstillväxt. Därmed lämpar sig **Cutimed HydroControl** för många olika sårtyper, i synnerhet för stagnerande sår.


### Principen: Osmos – skapa balans

Vattenmolekyler förflyttas automatiskt från områden med låg partikelkoncentration till områden med hög partikelkoncentration för att skapa balans. Precis som honung använder sig Cutimed HydroControl av den här principen genom den hydropolymerbaserade gelmatrisens unika sammansättning.

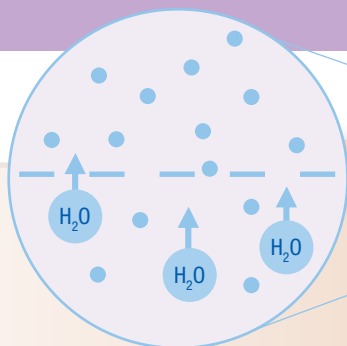



## 1. Absorbering av sårvätska

Vätska från sårbedden suggs upp av den hydropolymerbaserade gelmatrisen.

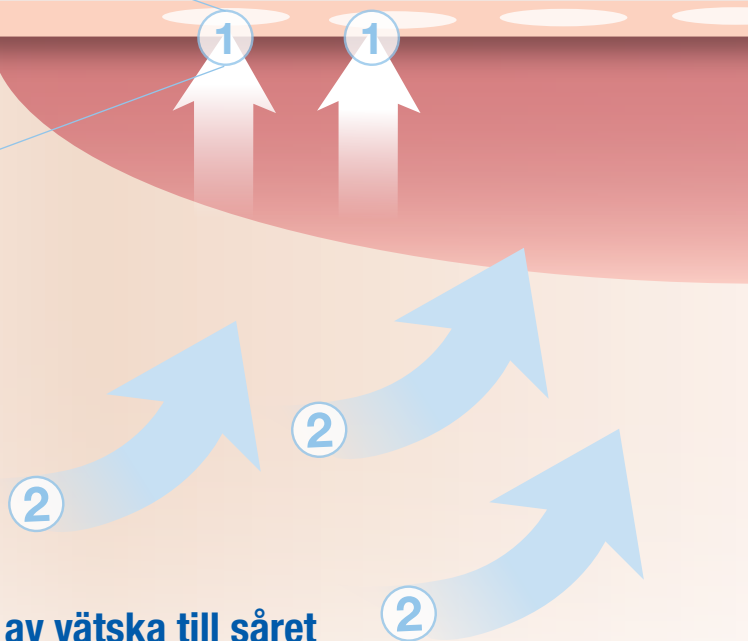

## 2. Tillflöde av vätska till såret

Genom osmos flödar vätska från den interstitiella vävnaden in i såret.

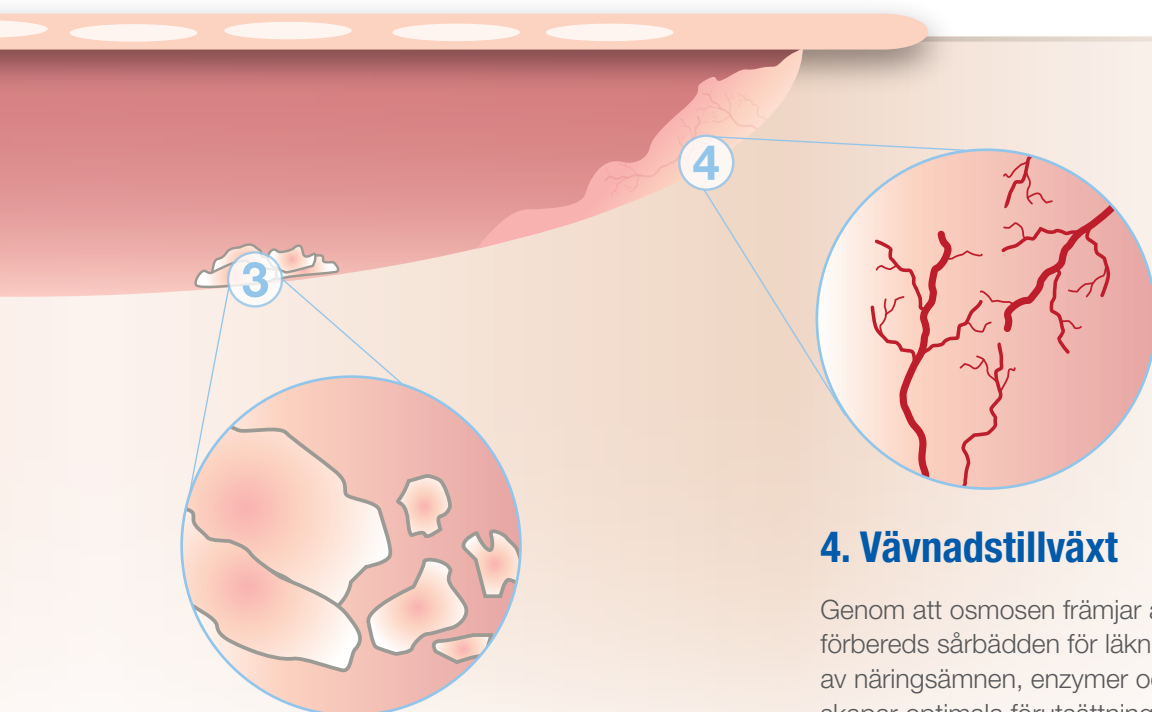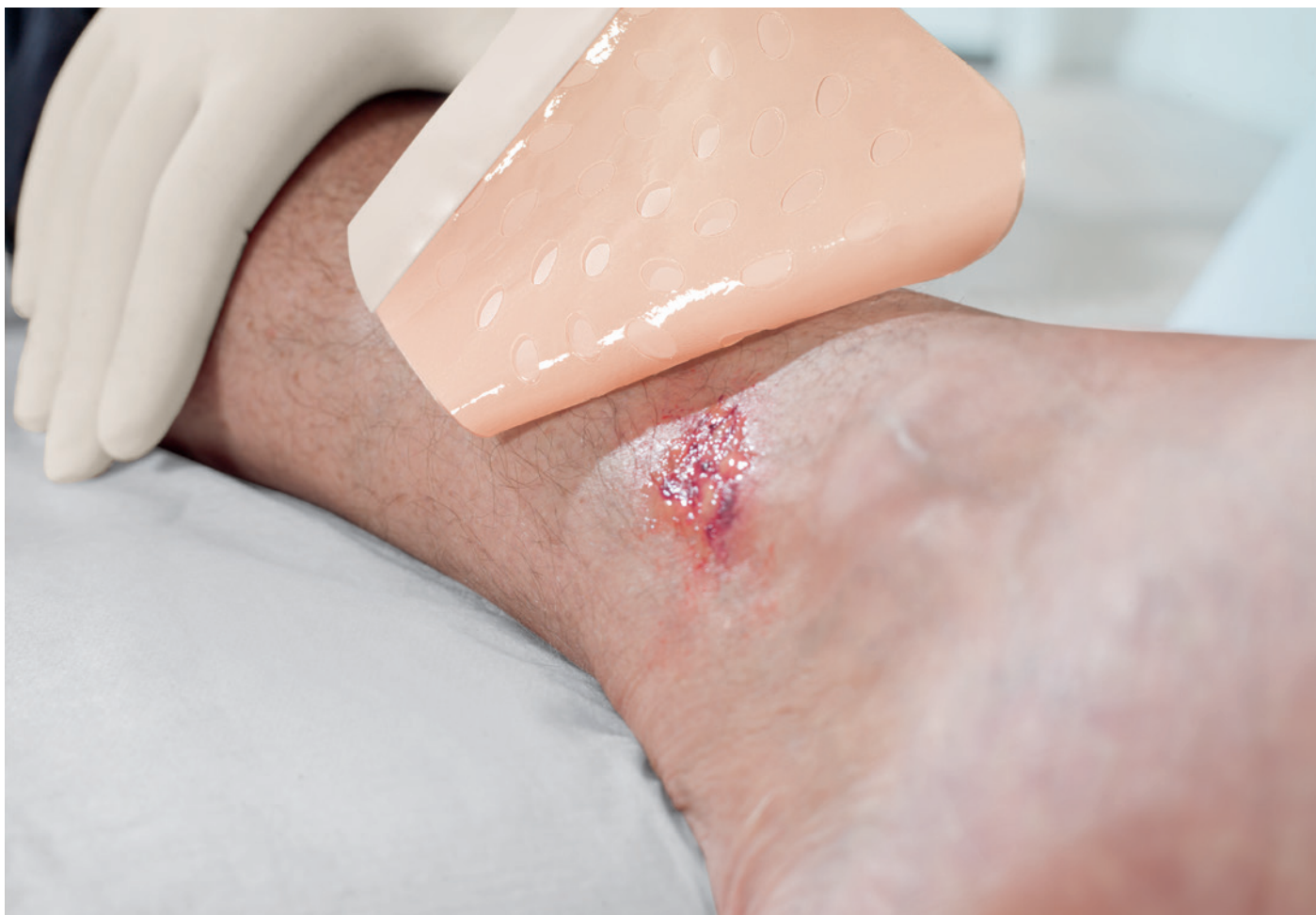

### 3. Autolytisk debridering

Den nya sårvätskan för också med sig enzymer till såret som bidrar till att avlägsna fibrin.

### 4. Vävnadstillväxt


Genom att osmosen främjar autolytisk debridering förbereds sårbädden för läkning. En ökad tillförsel av näringsämnen, enzymer och tillväxtfaktorer skapar optimala förutsättningar för bildandet av ny vävnad.

# Optimal fukthantering

Inget annat förband har samma fina kombination av vätskehantering och fukttilförsel som **Cutimed HydroControl**. Jämfört med sår förband för lätt till måttligt vätskande sår har **Cutimed HydroControl** en överlägsen vätskehanteringsförmåga tack vare den innovativa sammansättningen.




## Cutimed HydroControl\*

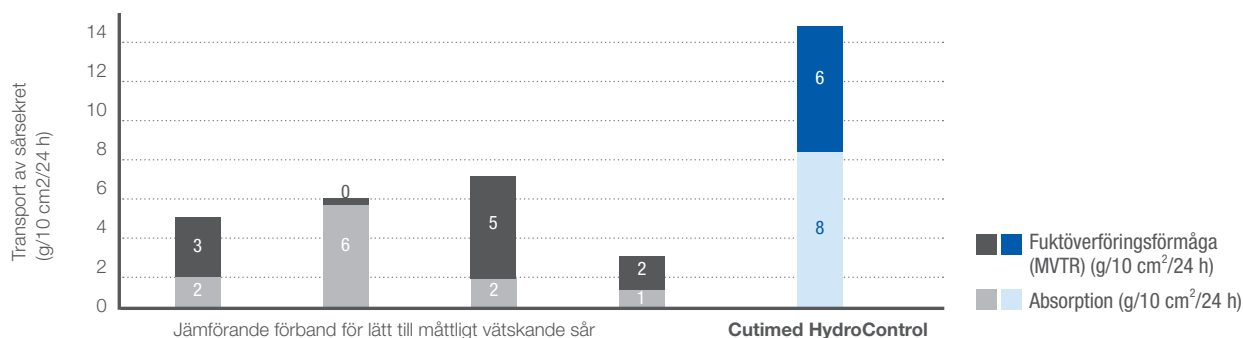

## Säkert, bättre, vertikalt


**Cutimed HydroControl** absorberar vätska vertikalt in i den hydropolymerbaserade gelmatrisen, där den stängs in. Därmed hålls fukten borta från sårkanterna vilket minskar risken för maceration.

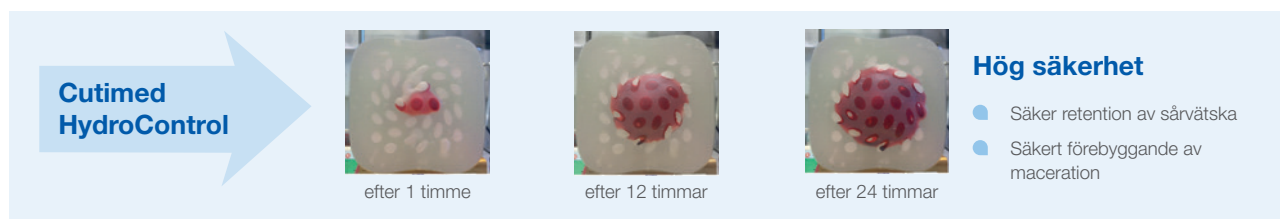

Källa: BSN medical data on File. JB4 40022569 - vätskehantering; JB4 40022570 -vertikal absorption.




# Den perfekta fuktbalansen - Främjar en fuktig sårläkning

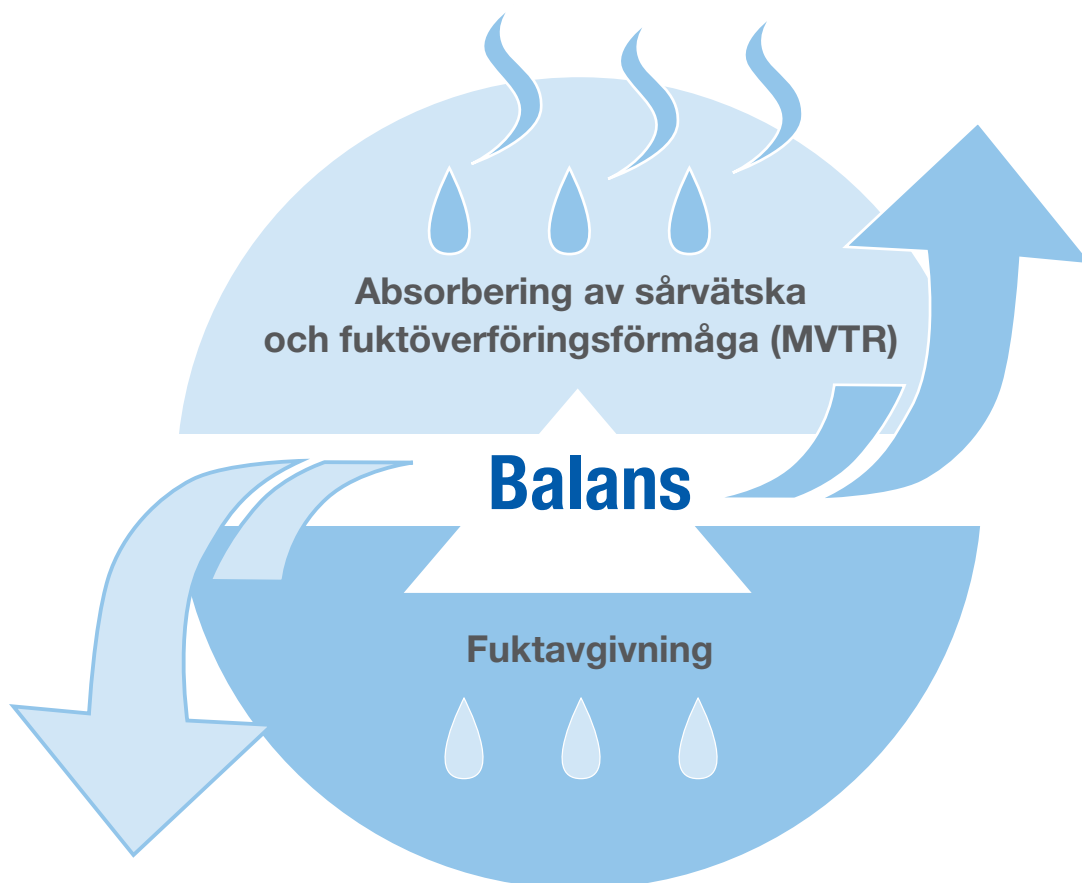

Kombinationen av den absorberande gelmatrisen av hydropolymer och filmens höga fuktöverföringsförmåga skapar en perfekt fuktbalans i såret. Beroende på de specifika förhållandena tillförs antingen fukt till såret, eller så förångas överskottsvätska genom **Cutimed HydroControl**-förbandets Flexipores och den översta filmen. En fuktbalans som skapas på det här sättet har en direkt, positiv inverkan på sårläkningen.

# Komfort på en helt ny nivå

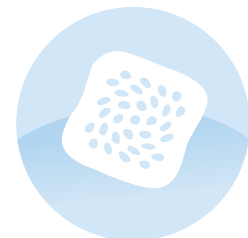

Förbandets struktur bidrar till hög komfort, som säkerställer en god patienttillfredsställelse.

## Hög användarkomfort

- Diskret beigefärgad
- Den effektiva och hudvänliga hydropolymer-matrixen säkerställer att förbandet sitter på plats

## Förbandet kan klippas till lämplig storlek

- Färre storlekar behövs och förbandet kan anpassas perfekt efter såret

## Tunt, formbart och självhäftande

- Enkelt att applicera och säkerställer god vidhäftning, även på besvärliga områden

## Fastnar inte i sårbedden


- Skyddar ny granulations- och epitelvävnad

## God vätskehanteringsförmåga\*

- Säker behandling vid upp till 7 dagars användning

## Lämpar sig för användning under kompression

- Kan användas under kompression

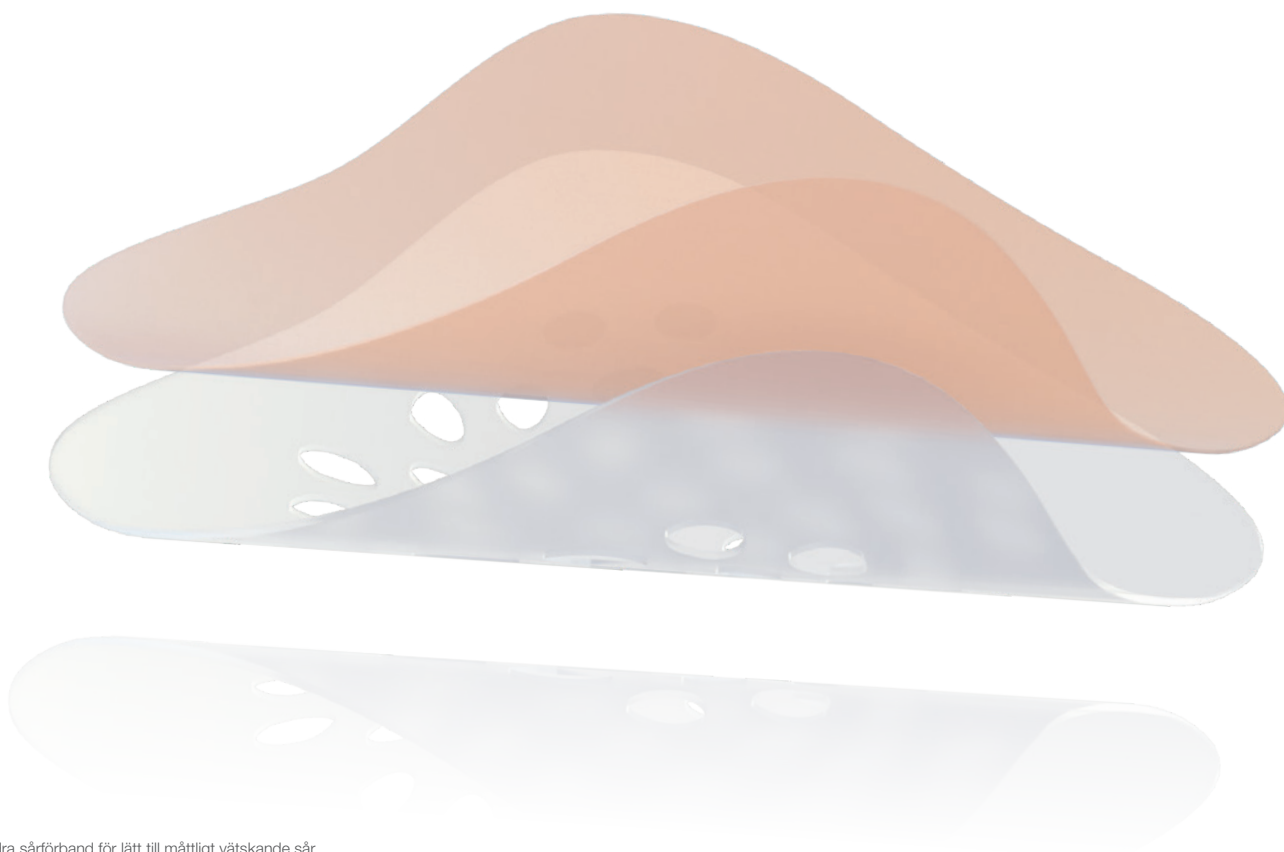

\*Jämfört med andra sårförband för lätt till måttligt vätskande sår.

# Cutimed HydroControl – Innovation och effekt

Ett fuktbalanserande, absorberande sårförband som bygger på fyra funktioner.

- Mycket god hantering av sårvätska
- Hög potential för sårstimulering
- Optimal fuktbalans
- Innovativ produktdesign



## Användningsområden

Cutimed HydroControl indikeras för torra till måttligt vätskande, ytliga, kroniska och sekundärläkande sår, t.ex.

- Venösa eller arteriella bensår
- Trycksår
- Diabetiska fotsår

Cutimed HydroControl kan användas under kompression.



## Produktinformation – Cutimed HydroControl

Art nr.	Storlek	Antal/fp	Antal/trp
73231-00	4,5 x 4,5 cm	10	30
73231-01	7,5 x 7,5 cm	10	30
73231-02	10 x 10 cm	10	10
73231-03	15 x 15 cm	5	10

## Experttips

**Fråga:** Kan patienten duscha med Cutimed HydroControl?

**Svar:** Om patienten vill duscha medan Cutimed HydroControl används rekommenderar vi att man fönstertejpar med en vattentät, självhäftande film (t.ex. Fixomull® transparent) som förseglar förbandets kanter.

## Fixomull® transparent

Ref nr	Storlek	Antal per förpackning	Rullar per fpk/trp
72217-02	10 cm x 2 m	1	1/12
72216-00	5 cm x 10 m	1	1/12
72216-01	10 cm x 10 m	1	1/12
72216-02	15 cm x 10 m	1	1/12

# Cutimed® EXSUDATteam: Tre spelare för optimal sårhäkning

Ett bra behandlingsval banar väg för en framgångsrik sårhäkning. Med **Cutimed®** har du tillförlitliga sårvårdsprodukter till hands för att hantera varje sårfas och olika nivåer av sårsvätska.

Hitta en passande produkt för icke-infekterade, vätskande sår:

## EXSUDATNIVÅ


SÅRSTADIER




Fibrinbelagt



Granulerande

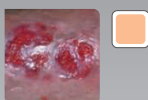

Epiteliserande

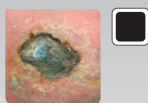

Nekrotiskt

- Autolytisk debridering ger en effektiv upprepning av fibrinbeläggning från såret

- Optimalt fuktigt sårklimat tack vare osmoseffekt
- Hög sårstimuleringspotential stödjer tillväxt av ny vävnad

- Skydd av epitelvävnad

- Autolytisk debridering ger en effektiv upprepning av nekrotisk vävnad



Den aktiva  
Cutimed® HydroControl

- Perfekt balans mellan absorption och fuktigt sårklimat

- Optimalt fuktigt sårklimat stödjer sårhäkningen
- Vertikal absorption minskar risken för maceration

- Skonsam och mindre smärtsam omläggning tack vare silikonlager



Den mjuka  
Cutimed® Siltec®


- Skonsam debridering minskar fibrinbeläggning på sårytan
- Binder bakterier, inflammationsfaktorer och sårsekret säkert i förbandet

### Cutimed® Sorbion® Sana:

- Optimalt fuktigt sårklimat stödjer sårhäkningen
- Skonsam omläggning



Den starka  
Cutimed® Sorbion®

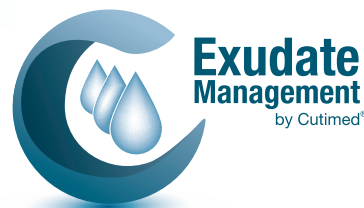

Cutimed® exsudatteam är indicerat för kroniska sår såsom exempelvis:\*

- Venösa eller arteriella bensår
- Trycksår
- Fotsår hos diabetiker

\* Ytterligare information finns i produkternas bruksanvisning.