


JOBST®

Effektiv
ödemreduktion
- Enkelt att applicera

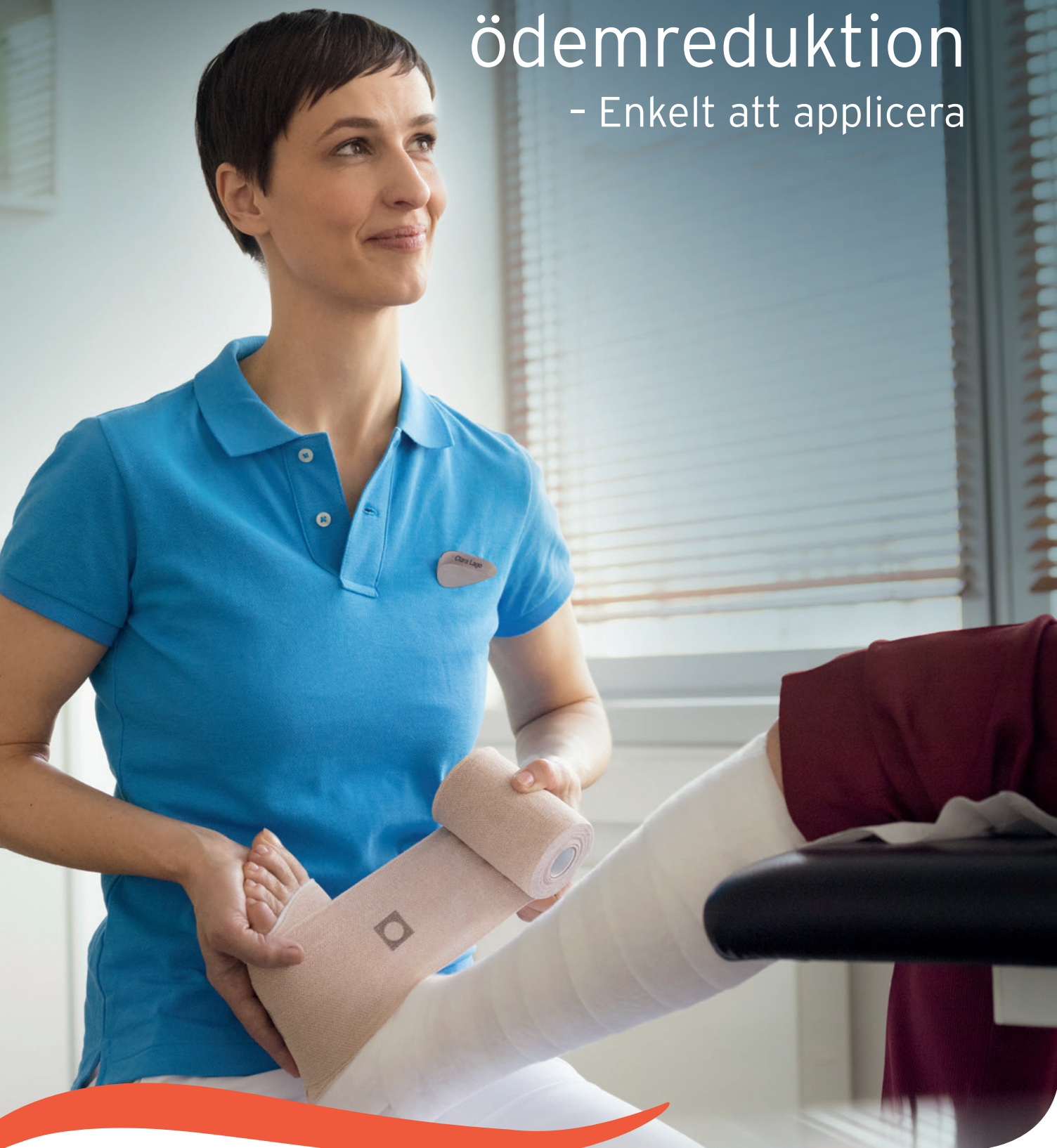

JOBST® Compri2

Det nya 2-lagers kompressionssystemet



Rätt kompression är nyckeln till ett bra resultat

Det är inte alltid lätt att lyckas med att reducera ödem och läka öppna venösa bensår i klassificeringsintervallet C3-C6 eftersom behandlingen är beroende av att man applicerar rätt kompression på benet. Tester visar att många behandlingar med kompressionsbandage antingen ger för mycket kompression eller för lite. Det innebär antingen att patienternas allmänna hälsa utsätts för ökad risk eller att behandlingen inte är så effektiv som den borde vara. Noggrant uvalda bandage ger möjlighet till sårhäkning utan fördröjning.

Korrekt diagnostik är en förutsättning för att säkerställa att blandade typer av arteriella och venösa sjukdomar behandlas med måttlig kompression, medan majoriteten av fallen kräver full kompression på grund av sitt venösa ursprung. Det finns dock en 20-procentig möjlighet att problemet enbart beror på en arteriell defekt, vilket gör kompression kontraindicerad.

CEAP-klassifikation av kronisk venös sjukdom (CVD)

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Inga synliga eller kännbara tecken på venös sjukdom	Inga synliga eller kännbara tecken på venös sjukdom	Varicier	Ödem	a. Pigmentering och/eller eksem b. Lipodermatoskleros och/eller atrophie blanche	Läkt venöst bensår	Aktivt venöst bensår

Källa: O'Donnel et al., 2014; Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery® and the American Venous Forum

Effektiv ödemreduktion för alla behov*

Upp till 7 dagar**

För CEAP-klassifikationerna C3-C5. Dessutom är det under sårhäkningsens granulations- och epiteliseringsfas (C6) ofta tillräckligt att övervaka utvecklingen efter några dagar, men bandaget kan sitta på upp till 7 dagar.

DET ENKLA - JOBST® Compri2

Kompressionssystem med 2 lager

- Omedelbart åtkomliga vägledningsverktyg underlättar applikationen och främjar korrekt kompression
- Två olika kompressionsnivåer för att säkerställa korrekt kompression, särskilt för blandade sjukdomstyper

EXPERTEN - JOBST® Comprifore

Kompressionssystem med 4 lager

- Exakt patientdesignad kompression, även för ovanligt stora ödem.
- Två olika kompressionsnivåer för att säkerställa korrekt kompression, särskilt för blandade sjukdomstyper.

24 timmar**

En daglig observationsrutin rekommenderas särskilt vid fall med kraftigt infekterade sår. Det finns även andra anledningar till att lägga om kompressionsförbandet oftare. Rekommenderad maximal användningstid: upp till 2 dagar.

DET FREKVENTA - Comprilan®

Kortsträckslinda

- Kombinerat med polstring erbjuder Comprilan kompression i alla situationer.
- Med god kunskap om appliceringstekniker kan man lätt uppnå det höga arbetstryck och det låga vilotryck som krävs.
- Comprilan kan tvättas, steriliseras vid behov och återanvändas upp till 10 gånger.

EFFEKTIV EXTREM - Gelocast®

Zinkbandage

- När Gelocast appliceras direkt på huden ger det utmärkt arbetstryck och extremt lågt vilotryck, vilket är det mest effektiva sättet för ödemreduktion.
- När systemet väl har torkat utgör det ett ytterligare hinder för patienter med dålig följsamhet, t.ex. sådana som lider av Alzheimers.

* Förutsättning: mobila patienter

** Maximal tid innan byte av bandage



Enkel applicering direkt från förpackningen

- Produkten som är enkel att applicera



Enkelt att applicera första lagret

- Appliceringen kring hälen blir mycket enklare tack vare töjbarhet på både bredd och längd
- Kan rivas av för att applicera extra polstring där det behövs

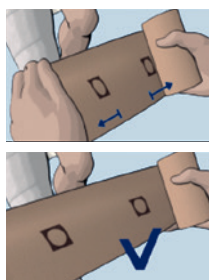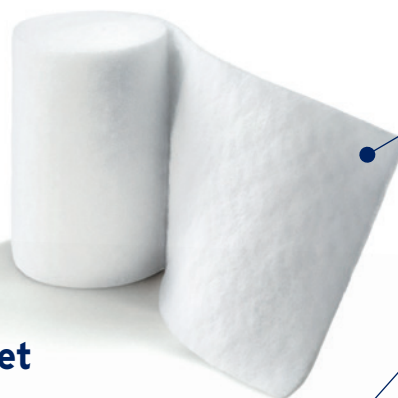

Enkelt att applicera andra lagret

- Andra lagret har en enkel kompressionsindikator för att möjliggöra korrekt kompression varje gång
- Bandaget kan justeras under appliceringen



Enkelt att förstå appliceringsinstruktionerna

- Vikt bruksanvisning i fickstorlek med lättförståeliga appliceringsillustrationer



Kompression efter behov

- Två val för att uppnå den kompression som behövs

Sjukdomstyp	Frekvens	ABPI	Kompressionsnivå	
Venös	~ 60%	>0.8	40 mmHg	JOBST Compr2
Venös/arteriell	~ 20%	0,5-0,8	20-30 mmHg	JOBST Compr2 lite
Arteriell	~ 20%	<0.5	Ingen kompression	-



Nu ännu enklare att applicera

Riv av fliken för mer information

- Ladda ner appen för att få full åtkomst till appliceringsvideon, även när du är ute på t.ex. patientbesök
- Upplys dina patienter med hjälp av informationen från JOBST Compri2

QR-koder på båda lindorna

- QR-koder på båda lindorna för din smartphone eller en annan digital enhet länkar dig direkt till användbara appliceringsvideor





” Det är inte bara smärtfritt,
det är bekvämt!”

JOBST Compri2 fungerar eftersom patienter tolererar det

Det finns två viktiga saker som krävs för att din kompressionsbehandling ska lyckas: Att korrekt kompression enkelt kan appliceras och att patienten är följsam.


Om patienter tycker att behandlingen är smärtsam, besvärlig eller obehvämlig kommer de inte att följa den.

” Ingen kan se att jag behandlas. Jag kan till och med använda mina vanliga skor”

- Det totala systemet är relativt tunt, vilket gör att man kan använda de flesta skor

” Jag trodde aldrig att ett bandage kunde vara så enkelt och smärtfritt att använda”

- Rivbar polstervadd möjliggör extra polstring på områden som fotknölar och häl för att minska risken för tryckpunkter
- Aktiv fukthantering transporterar in fukt i systemet och håller huden torr.

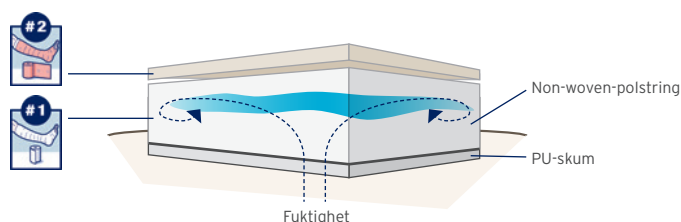


” Kompressionen fungerar verkligen och jag förstår varför jag måste fortsätta”



- Skannbar QR-kod med direktlänk till patientinformation: FAQ, viktig information om dagliga behov och behandling

” Det är fantastiskt att se hur snabbt mitt ödem minskar”

- Inkluderad papperslinjal för att ge ungefärlig vägledning till ödemreduktion
- Sidoflik för att registrera ödemreduktionens förlopp

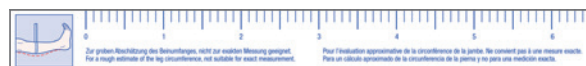

Beställningsinformation

- Upp till 7 dagar**

För CEAP-klassifikationerna C3-C5. Dessutom är det under sårsläckningens granulations- och epiteliseringsfas (C6) ofta tillräckligt att övervaka utvecklingen efter några dagar, men bandaget kan sitta på upp till 7 dagar.

DET ENKLA

Kompressionssystem med 2 lager, snabbåtkomliga vägledningsverktyg och två olika kompressionsnivåer säkrar korrekt kompression.

Art.Nr.	Ankelstorlek	Kit/fp	Kit/trp
JOBST® Compriz - Normal kompression (ABPI >0,8)			
76271-00	18-25 cm	1	10
76271-01	25-32 cm	1	10
JOBST® Compriz lite - Reducerad kompression (ABPI 0,5-0,8)			
76271-02	18-25 cm	1	10
76271-03	25-32 cm	1	10

EXPERTEN

Kompressionssystem med 4 lager, exakt kompression, även för ovanligt stora ödem och två olika kompressionsnivåer säkrar korrekt kompression.

Art.Nr.	Ankelstorlek	Kit/fp	Kit/trp
JOBST® Comprifore - Normal kompression (ABPI >0,8)			
72661-04	18-25 cm	1	8
72661-05 (utan latex)	18-25 cm	1	8
JOBST® Comprifore lite - Reducerad kompression (ABPI 0,5-0,8)			
72661-06	18-25 cm	1	8
72661-07 (utan latex)	18-25 cm	1	8

Beställningsinformation

- 24 timmar**

En daglig observationsrutin rekommenderas särskilt vid fall med kraftigt infekterade sår. Det finns även andra anledningar till att lägga om kompressionsförbandet oftare.

DET FREKVENTA

Kortsträckslinda Comprilan® kan tvättas, steriliseras vid behov och återanvändas.

Art.Nr.	Storlek	Lindor/fp	Lindor/trp
Comprilan®			
01027-01	5 m x 8 cm	5	34
01028-01	5 m x 10 cm	5	70
01029-01	5 m x 12 cm	5	60
Soffban® Natural - För polstring			
71469-00	2,7 m x 10 cm	12	1

EFFEKTIV EXTREM

Zinkbandage, för en effektiv ödemreduktion hos patienter med dålig följsamhet. Även ett ytterligare hinder för patienter med dålig följsamhet.

Art.Nr.	Storlek	Lindor/fp	Lindor/trp
Gelocast®			
01052-01	9,2 m x 8 cm	1	12
01053-01	9,2 m x 10 cm	1	12

** Maximal tid innan byte av bandaget.