

## Scrub suit Special Personalkläder med muddar



### Ingående delar/material

**Tyg:** 100% Soft SMS non-woven av polypropylen (PP) 35g/m<sup>2</sup>  
**Mudd:** Nylon  
**Knappar:** Polypropylen (PP)

### Färg

Grön  
Vit  
Vit

**Skjorta:** Knäppning 2 st vita tryckknappar.  
1 st bröstficka med 1 tryckknapp, 2 st sidofickor.  
Mudd på ärm och i midja. Bredd ca 4 cm.

**Byxa:** Dragsko i midja.  
2st benfickor.  
Mudd i ben, nederkant. Bredd 6 cm.

### Förpackningar

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

PE-påse  
kartong  
kartong

### Avfallshantering\*

mjukplast  
kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

### Skjorta

\*Mätt från axel till mudd.

Art.nr.	Längd* cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9500	XS = 69	1	20	4 x 20 = 80	TFP
9505	S = 72	1	20	4 x 20 = 80	TFP
9510	M = 73	1	20	4 x 20 = 80	TFP
9515	L = 74	1	15	4 x 15 = 60	TFP
9520	XL = 80	1	15	4 x 15 = 60	TFP
9525	XXL = 80	1	15	4 x 15 = 60	TFP

### Byxa

\*\*Benlängd mätt från midja till mudd.

Art.nr.	Längd** cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9550	XS = 96	1	20	4 x 20 = 80	TFP
9555	S = 97	1	20	4 x 20 = 80	TFP
9560	M = 103	1	20	4 x 20 = 80	TFP
9565	L = 113	1	15	4 x 15 = 60	TFP
9570	XL = 114	1	15	4 x 15 = 60	TFP
9575	XXL = 118	1	15	4 x 15 = 60	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

## Indikation

Engångs, osterila arbetskläder avsedda för personal i vårdarbete.

## Egenskaper

Plaggen är tillverkade av mjukt textilliknande, dynamiskt material som är komfortabelt och följsamt.

Skjortan har kort ärm för att korrekt hygien ska kunna iakttas.

Byxan har dragsko i midjan för optimal passform.

Plaggens storlek kan med fördel mixas för bästa anpassning till bäraren. Exempelvis kan storlek M användas i skjorta och stl L i byxa eller omvänt.

Produkten innehåller inte PVC.

## Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen.
2. Skjortan tas på genom att dra den över huvudet. För att underlätta påtagning kan knappen i halslinningen öppnas.
3. Byxan tas på på sedvanligt sätt. Drag åt dragskon i midjan för säker fixering.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.

## Tillverkning



Tillverkning av produkten sker i renrum.

Produkterna uppfyller kraven enligt EN-13795-2:2019 Operationskläder och draperingsmaterial - Krav och testmetoder - Del 2: Specialarbetsdräkter



## Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

## Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



**Manufacturer:**  
Amaryllis Healthcare Pvt. Ltd.,  
Plot No: 112, Bommasandra Jigani Link Road  
Ind. Area Bandenallasandra Village, Jigani Hobli,  
Anekal Taluk Bangalore -560105, Karnataka  
India

**Importer:**  
AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

**EU REP EU-REP:**  
Amstermed B.V.  
Van der Burchstraat 28  
2132 RN Hoofddorp  
The Netherlands