

ThinPrep® Pap Test

Instruktion för provtagning och provöverföring



Protokoll för provtagning med Rovers® Cervex-Brush Combi


- Förbered allt material innan provtagning.
- Kontrollera utgångsdatum på burken. Använd inte utgången material.
- Se till att plastförseglingen från locket är helt borttagen.
- Fyll i patientdata på både remiss och burk. Saknas detta returneras provet.
- Öppna burken innan provtagning.
- Använd inte glidmedel då detta kan påverka den vätskebaserade provprepareringen.



Fyll i

Patientens namn och födelsedata på burken.

Patientens medicinska historia på cytologiremissen.

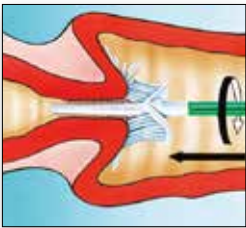

Ta

Ett adekvat prov från portio med Rovers Cervex-Brush Combi (grön kvast-liknande med integrerad endocervikal borste). Vid behov använd ljummet vatten på spekulum.

För in borsten i cervixkanalen så att borsten får fullständig kontakt med portio.

Tryck lätt och rotera borsten medsols 2 varv.



Skölj

Rovers Cervex-Brush Combi omedelbart i PreservCyt® Solution-lösningen i burken, tryck den kraftigt mot botten av burken 10 gånger, så att borsten tvingas isär. Avsluta med att vispa borsten kraftigt för att frigöra ytterliga material.

Släng borsten. **Lämna inte borsthuvudet kvar i burken.**



Skruva

På locket på burken så de svarta markeringarna möts eller överlappar en aning.



Lägg

Burk och remiss i transportlåda eller liknande för transport till laboratoriet.

Vanliga frågor

Vad gör jag om burken välter?

Om burken välter efter provtagning, se efter om det är någon vätska kvar i burken. Om det är ca en tredjedel kvar kan burken sändas till laboratoriet. Skriv på remissen att en del av vätskan har spillts ut. Fyll inte upp vätskan i burken med vätska från en annan burk. Laboratoriet kommer att fylla upp provet och processa det.

Om ingen vätska finns kvar måste provet tas om.

Kan jag ta ett prov om patienten har mens?

Nej, prov under menstruation ska undvikas.

Kan jag använda glidmedel?

Använd inte glidmedel då detta kan inverka på ThinPrep Pap Test-provet.

Kan jag använda Rovers Cervex-Brush Combi när det är stenosis på livmodermunnen?

Rovers Cervex-Brush Combi har en integrerad endocervikalborste som kan användas vid de flesta tillfällen. Vid de tillfällen när stenosen är allvarlig, kan man eventuellt använda en cervixborste av standardtyp.

Kan jag använda Rovers Cervex-Brush Combi till provtagning på kvinnor som har gjort hysterektomi?

Nej, för detta rekommenderas en cervixborste av standardtyp. Cervixborsten bör då användas genom att en svepande rörelse görs över provtagningsområdet.

Kan jag använda Rovers Cervex-Brush Combi när det är en omfattande cervikal ektopi?

Ja, Rovers Cervex-Brush Combi kan användas som normalt.

Behöver jag ta ett separat prov för HPV-test?

Nej, HPV test kan göras på det material som finns i burken.

Att göra

- **Att** försiktigt ta bort slem, om det finns mycket, innan provtagning.
- **Att** rotera Rovers Cervex Brush-Combi 2 gånger medsols.
- **Att** omedelbart skölja av provtagningsmaterialet i burken.
- **Att** skruva på locket så de svarta markeringarna möter varandra eller överlappar en aning för att undvika läckage.
- **Att** hålla den del av burken som inte har etikett fri så att man ser vätskan.
- **Att** sända provet till laboratoriet utan dröjsmål.

Inte göra

- **Inte** använda Rovers Cervex Brush-Combi under graviditet.
- **Inte** rengöra cervix innan provtagning.
- **Inte** använda glidmedel.
- **Inte** låta Rovers Cervex Brush-Combi stå utan omrörning i burken under tiden du tar hand om patienten.
- **Inte** skruva på locket för hårt.
- **Inte** lossa borsthuvudet och lämna det i burken vid användning av en Rovers Cervex Brush-Combi.
- **Inte** placera flera olika etiketter på burken.
- **Inte** använda provbehållare vars hållbarhetstid gått ut.
- **Inte** försena inskick av burk till laboratoriet.



Hologic Sweden AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
Tel: 020-797 943
NordicInq@hologic.com

1. Cervicovaginal Cytology Based on the Papanicolaou Technique; Approved Guideline - Third Edition (Clinical and Laboratory Standards Institute GP 15-A3).

TRN-00126-NOR-SE, Rev 002 © 2021 Hologic, Inc. Med ensamrätt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Hologic, ThinPrep, PreservCyt och tillhörande logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och / eller dess dotterbolag i USA och / eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Denna information är avsedd för vårdpersonal i USA och på andra marknader, och är inte avsedd som en produkt godkännande eller kampanj där sådana aktiviteter är förbjudna. Eftersom Hologic materialet distribueras via webbplatser, eBroadcasts och mässor, är det inte alltid möjligt att kontrollera om råvarorna visas. För specifik information om vilka produkter som är tillgängliga för försäljning i ett visst land, kontakta din lokala Hologic representant eller skriv till **NordicInq@hologic.com**.