




PRODUKTFAKTABLAD TENA LADY MINI PLUS

Användningsområde

TENA Lady Mini Plus är läckagesäkra, bekväma och diskreta bindor för mindre till måttliga urinläckage.

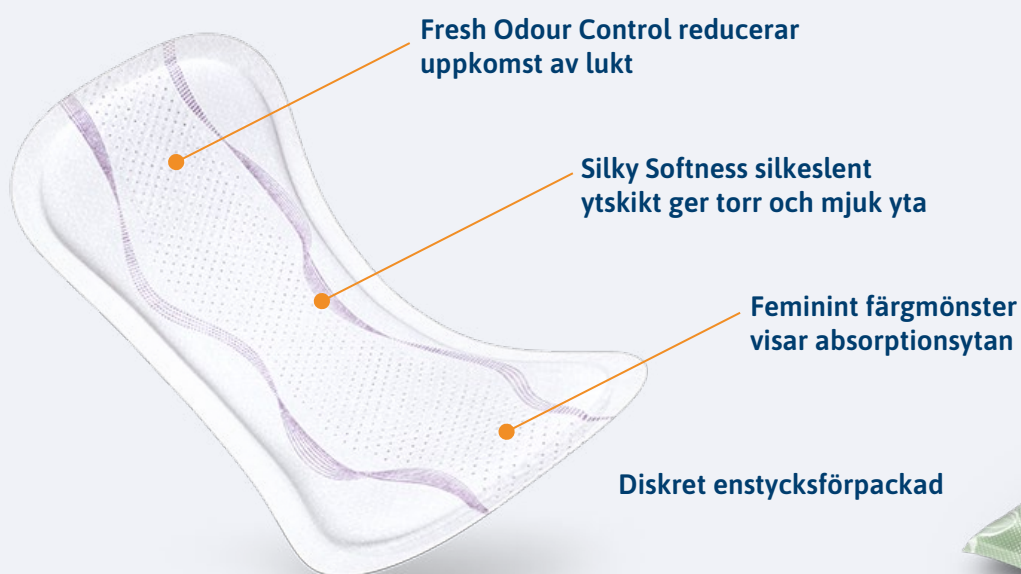

Produktegenskaper

TENA Lady Mini Plus har en absorberande kärna med superabsorbenter och ett silkeslent ytskikt, Silky Softness, som ger mycket hög absorptionshastighet och bra återvätningsegenskaper. Det mjuka ytskiktet gör även skyddet mjukt och bekvämt att bära.

Andningsbart spärrskikt som är klätt med textilliknande nonwoven ger ökad komfort och god hudmiljö. TENA Lady har Fresh Odour Control. Unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred längsgående tejprensa på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med produktnamn/storlek. Skydden är diskret enstycksförpackade.



Produktfaktablad TENA Lady Mini Plus



TENA Lady									
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/ påse st	Antal/ kart st	Praktisk absorp- tion	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Mini Plus	✓	27.7	10	13	24	144	94 ml	284 ml	76 07 98



TENA Lady ger trippelt skydd från läckage, lukt och fukt.



Fresh Odour Control

- unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Användarinstruktion

Ta skyddet ur enstycksförpackningen och vik upp det. Dra bort skyddspappret på baksidan.

Fäst skyddet, med den bredare delen bak, i åtsittande trosa eller fixeringsbyxa. Se till att skyddet behåller sin skålform. Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfalls hantering.

Produktfaktablad TENA Lady Mini Plus

Ingående material

YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE).

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Lady skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsatts produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige

 **essity** TENA,
an Essity brand

