

# Advazorb Areola

Absorberande skumförband med ett mjukt sårkontaktlager av silikon och häftkant



## Produktinformation

Advazorb Areola bröstförband, ergonomiskt utformat för att passa bröstets konturer vilket gör att förbandet appliceras, enkelt, snabbt och bekvämt för patienten. Absorberande förband med ett mjukt sårkontaktlager av silikon och häftkant från Silfix®. Skumdyna med hög absorptionskapacitet. Atraumatiskt förband. Ytterskiktet andas och förhindrar genomblödning. Centrala hålet förhindrar tryck på bröstvårtan, en baksida med låg friktion förhindrar obekvämt att fastna på kläderna.

## Indikationer

Formad för att kunna användas på bröstvårtan, lämplig för:

- Akuta och kroniska sår
- Traumasår
- Operationssår
- Mastopexi
- Gynekomasti
- Bröstförstoring
- Skrubbsår

## Förbandsbyte

Förbandet kan lämnas på plats i upp till 7 dagar men bör bytas ut när sårvätska syns i mittdynan eller om dynan sväller på grund av absorberad sårvätska.

## Användarinstruktioner

- Se till att området har rengjorts
- Torka försiktigt den omgivande huden
- Ta bort de transparenta plastfilmerna och applicera direkt över bröstvårtan
- Se till att den absorberande dynan täcker hela sårområdet med en överlappning på 1-2 cm
- Släta försiktigt ut "kronbladen" för att säkerställa god vidhäftning
- Vid behov säkra med tejp, lämpligt bandage eller ett sekundärt förband
- Förvara i rumstemperatur, skydda från solljus och håll torrt



**Hållbarhet:** 3 år i obruten förpackning

**Material:** absorberande skumförband, silikon

## Orderinformation

| Art.nr | Benämning       | Storlek | Avd. fp | Trp. fp | Klass          |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|----------------|
| CR4490 | Advazorb Areola | 13x13cm | 10      | 200     | MD IIb, steril |