

Advazorb Fixation

Absorberande trakeostomi förband med sårkontaktlager och kant av silikon



Produktinformation

Advazorb Fixation självhäftande, absorberande trakeostomi förband med ett mjukt sårkontaktlager och kant av Silfix® sårkontaktlager med PVC-knapp. Centrala knappen förhindrar oönskat luftflöde när mildt tryck appliceras under prat, skratt, hosta och nysningar. Vattentät baksida gör det möjligt för patient att duscha utan att behöva täcka över eller byta förband efteråt. Absorberande dyna med hög absorptionskapacitet. Atraumatiskt förband. Ytterskiktet andas och förhindrar genomblödning.

Indikationer

- Trakeostomi

Förbandsbyte

Förbandet kan lämnas på plats i upp till 7 dagar men bör bytas när sekret/exsudat syns, eller om dynan sväller på grund av absorbering.

Användarinstruktioner

- Se till att området har rengjorts
- Torka försiktigt den omgivande huden
- Drag av ytterskiktet på mitten.
- Håll i PVC-knappen och placera förbandet direkt över stomistället.
- När förbandet har fäst mot omgivande hud, drag bort återstående ytterskikt försiktigt och tryck fast ordentligt mot halsen.
- Förvara i rumstemperatur, skydda från solljus och håll torrt.



Hållbarhet: 3 år i obruten förpackning

Material: absorberande skumförband, silikon

Orderinformation

Art.nr	Benämning	Storlek	Avd. fp	Trp. fp	Klass
CR4341	Advazorb Fixation	12x10cm	10	160	MD IIb, steril