

## Injektionstork fuktad med 70% Isopropylalkohol



### Ingående delar/material

### CAS-nr

### Färg

<b>Tork:</b>	Viskos Nonwoven 3 x 3 cm Utvikt mått: 3 x 6 cm		Vit, utan optiskt blekmedel
<b>Fuktad med:</b>	70% Isopropylalkohol 30% Destillerat vatten	67-63-0 7732-18-05	

### Förpackningar

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

papper/folie  
ask med lock  
kartong

### Avfallshantering\*

förbränning  
kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
TM1605	1	200	50 x 200 = 10 000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Rengöring och desinfektion av intakt hud.

### Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en papper/folie förpackning.
2. Riv av ett hörn på förpackningen och ta ut den fuktade torken.
3. Rengör huden och kassera tork och förpackning enligt instruktion.




### Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad finns för produkten och senaste version återfinns på AST:s hemsida.


### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/EEC klass IIa

SYMBOLER ENL. EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
---	---

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Baoying County Fukang Medical Appliance Co,Ltd  
Guangyang road, Huangcheng Town Industrial Area  
Baoying County, 225800 Jiangsu  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

SUNGO Europe B.V  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7  
Capelle aan den IJssel  
Netherlands