

RECAcare ANAL TAMPONG

Produktbroschyr



RECAcare ANAL TAMPONG

Mer frihet – med tamponger för avföringsläckage

Bra att veta

Avföringsinkontinens är inte enbart en begränsning av patientens livskvalitet på grund av den fysiska dysfunktionen. Den mentala påfrestningen som uppstår till följd av känslan av isolering, vilken ofta följer med de specifika symptomen på detta tillstånd, minskar vitaliteten avsevärt. Den anala tampongen RECAcare hjälper vid avföringsläckage och ger många timmars trygghet, för dem som drabbas av detta besvär.

RECAcare anal tampong är det perfekta alternativet till traditionella hjälpmedel. Tampongen ersätter funktionen hos den inre sfinktern och bidrar till en känsla av trygghet och frihet i alla situationer. Olika former och storlekar garanterar en optimal passform för kroppen. RECAcare binder lukt och är inte synlig utifrån – du ser inget, du luktar inget!



Fördelar

- liten och praktisk
- diskret
- perfekt passform
- säkerhet i upp till 20 timmar
- tolereras väl
- 7 olika former och storlekar

Önskar du prova produkten?

För att hitta den optimala tampongstorleken har vi skapat ettprov set som innehåller 7 olika tamponger samt en införare. Om du har prov setet och redan har hittat rätt RECAcare-tampong kan du enkelt beställa just den artikeln.

RECACARE ANAL TAMPONG

Enkelt och säkert



Indikationer

- Som stöd för träning av den anala sfinktern
- Paraplegi
- Stroke, MS, diabetes
- Meningomyelocoele (spina bifida)
- Trycksår eller förebyggande av trycksår
- Crohns sjukdom, ulcerös kolit
- Operations- eller strålningsskador
- Permanent svaghet i den anala sfinktern

HJÄLP VID AVFÖRINGSLÄCKAGE



- Tvätta händerna och ta bort skyddsplasten.
- Blötlägg **RECAcare** i varmt vatten i en minut och krama ur tampongen.
- Placera tampongen på införaren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning (ligg på rygg med böjda knän, sitt på toaletten eller stå med ena foten på en stol).
- För in tampongen rektalt och dra ut införaren när tampongen är på plats.
- Tampongen kan sitta kvar i rektum i upp till 20 timmar.

Produktinformation

Artikelnummer Ø / längd mm	20.3 25/52	20.4 35/63			30.1 25/115
Artikelnummer Ø / längd mm	40.24 23/48	40.30 28/50	40.35 33/55	44.24 23/48	44.35 33/56

Engångsprodukt; material: PVA-skum; snöre: 100 % polyester;
Förpackningsenhet: 10 stycken

Prov set

Innehåll	Artikelnummer	Innehåll	Artikelnummer
1 st	20.3	1 st	40.35
1 st	20.4	1 st	44.24
1 st	40.24	1 st	44.35
1 st	40.30	1 st	30.1 Införare