



Bruksanvisning

Anal tampong för att förebygga
läckage av avföring



Feel free!




Användning steg för steg:

- Tvätta händerna, ta bort skyddsfilm från tampongen. Lossa snöret lite lätt.
- Blötlägg **RECAcare** i varmt vatten i en minut och krama ur tampongen.
- Placera tampongen på införaren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning, ligg på rygg med böjda knän, sitt på en toalett eller stå med ena foten på en stol.
- För in tampongen rektalt och dra ut införaren när den är placerad. En nypreflex kan uppstå vid beröring av sfinktern, vänta cirka 8 till 10 sekunder och för in tampongen.
- Du kan när som helst ta bort **RECAcare** med hjälp av snöret vid ditt toalettbesök. **RECAcare** kastas efter engångsbruk med hushållsavfallet.

Ditt välmående är viktigt för oss:

- Om du vill kan du fixera den utdragna tråden med ett hudvänligt plåster.
- Ta bort tampongen senast efter 20 timmar.
- Det är inte nödvändigt att ta ut tampongen vid bad/simning.
- Du behöver inte ta bort tampongen när du kissar.
- Rengör införaren efter användning med pH-neutral tvål och skölj noga med vatten.

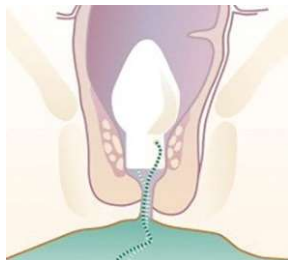

Storlekar och artikelnummer:

Item no.	20.3	20.4	30.1
Ø / length mm	25/52	35/63	25/115

Item no.	40.24	40.30	40.35	44.24	44.35
Ø / length mm	23/48	28/50	33/55	23/48	33/56

material: pva-skum, tråd: 100% polyester;
Förpackningsstorlek: 10 st; Prov set: 15 st i olika storlekar och former, 1 införare



06/24-4.2.4-1/4

② Ej för återanvändning  Följ instruktionerna

Kontraindikationer:

- Blödningar med okänt ursprung
- Tarmobstruktion
- Akuta infektioner i buken
- Okända smärtor i buken

Side effects:

Vid användning av RECAcare kan det ibland uppstå en tryckkänsla. Denna känsla försvinner normalt efter 3-4 dagar efter att tampongen tagits bort.

Varning:

Vi ber dig att följa bruksanvisningen. RECA Med ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning. Vi kan inte garantera de hygieniska förhållandena vid flerfaldig användning.

B Berner Medical/Bröderna Berner AB
Bergkällavägen 27A, 192 79 Sollentuna
Tel: 08-446 15 06
info.medical.se@bernercompany.com

 Gustav-Schickedanz-Str. 8 · D – 90762 Fürth
Tel: +49 (0) 911 7406620 · Fax: +49 (0) 911 7406621
freiheit@recamed.de · www.recamed.de

RECA Med
Medical Care Products 