



# Kiilto Pro Keyboard wipe

## 80 pcs

### Desinfektionsservett



Kiilto Pro Keyboard wipes är en mjuk desinfektionsservett speciellt anpassad för snabb och effektiv desinfektion av tangentbord, datormus, analoga telefoner, fjärrkontroller etc. Servetten är gjord av 100% bionedbrytbart material.

<b>Användningsområde</b>	Dukarna och servetterna har utvecklats för desinfektion av tangentbord, fjärrkontroller och fasta telefoner och har en lagom mängd vätska och en anpassad duk för dessa ändamål.
<b>Produktegenskaper</b>	<p>Att desinficera ytor som ofta berörs, såsom tangentbord eller fjärrkontroller, kan vara viktigt i många olika utrymmen, allt från kontor till sjukhusmiljöer, eller till och med när du är på språng. Kiilto Pro Keyboard Wipe minskar risken för spridning av infektioner, samtidigt som den är snabb och enkel att använda.</p> <p>Servetterna är gjorda av viskos, som är ett biologiskt nedbrytbart material, och fuktade med etanolbaserat ytdesinfektionsmedel. Kiilto Pro Keyboard Wipe avdödar effektivt bakterier och olika virus som t.ex. Corona-, Adeno- och Murine Norovirus.</p> <p>Produkten uppfyller följande EN-tester gällande effektivitet: EN13727 (bakterier) 30 sek EN 16615 (bakterier &amp; jästsvamp) 2 min EN 13624 (jästsvamp) 30 sek, EN 14476 (höljeförsedda virus + Adeno &amp; Murine Norovirus) 30 sek, EN 14348 (mykobakterier) 1 min.</p> <p>Storleken på servetten är 14 x 19,5 cm. Singelförpackade servetter i en praktisk och användarvänlig displaybox om 80 servetter.</p>
<b>Bruksanvisning</b>	Gnid duken / servetten över ytan så att den är fuktig i minst 1 minut. Om avdunstning sker snabbare måste proceduren upprepas.
<b>Obs</b>	Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
<b>Förvaring</b>	Förvaras i rumstemperatur. Hållbarheten är 3 år från tillverkning i obruten förpackning. Servetten är avsedd för engångsanvändning.
<b>Tillverkningsland</b>	UNGERN
<b>Förpackningsmaterial</b>	Använd servett och folie slängs i hushållsavfallet. Oanvänd produkt sorteras som farligt avfall. Displaykartongen sorteras som kartong.

Förpackningsvolym / Transport krt.  
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

1 x 80 st

55210

6417964552102



Ytterligare  
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).