

# EURODEFIPADS®

Elettrodi multifunzione monouso, per defibrillazione esterna, cardioversione sincronizzata transtoracica, elettrostimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ECG. Progettati per la connessione diretta a cavi e defibrillatori, sono caratterizzati da una bassa impedenza ed una ridotta soglia di stimolazione, con un'ottima adattabilità alla cute del paziente. Sono disponibili modelli per pazienti adulti, pediatrici ed anche adulti/pediatrici, in varianti radiotrasparenti e preconnettibili. Alcuni modelli pediatrici da utilizzare con defibrillatori automatici (AED) prevedono un sistema di riduzione dell'energia. I prodotti non contengono lattice né ftalati.

Multifunktions defibrilleringselektroder av engångstyp för defibrillering, synkroniserad elkonvertering, transkutan hjärtstimulering och EKG-övervakning med direktanslutning till kablar och defibrillatorer. De karaktäriseras av en låg impedans och en reducerad stimuleringsströmskel med en utmärkt följsamhet gentemot patientens hud. Modeller för vuxna och barn samt även kombinerade vuxen-/barnvarianter finns. Vissa modeller finns med anslutning och kabel utanför påsen (färdigkopplade) eller är röntgentransparenta. Några modeller för barn är försedda energireduceringsystem för direkt anslutning till helautomatiska defibrillatorer (AED). Produkterna är fria från Latex och ftalater.

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TEKNISKA EGENSKAPER

| Serie<br>Serie  | ADULTI >8 anni (> 25 kg)<br>VUXEN >8 år (> 25 kg)  |                                      |   | PEDIATRICHE <8 anni (< 25 kg)<br>BARN <8 år (< 25 kg) |   | ADULTI / PEDIATRICHE<br>>1 anno (> 10 kg)<br>VUXEN / BARN<br>>1 år (> 10 kg) |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|
|   | STANDARD   | CAVO FUORI<br>BUSTA<br>FÄRDIGKOPPLAD | RADIOTRASPARANTI<br>cavo dentro/fuori busta<br>RÖNTGENTRANSPARANT<br>standard/färdigkopplad | STANDARD/<br>CAVO FUORI BUSTA<br>STANDARD/FÄRDIGKOPPL | RADIOTRASPARANTI<br>cavo dentro/fuori busta<br>RÖNTGENTRANSPARANT<br>standard/färdigkopplad | STANDARD/<br>CAVO FUORI BUSTA<br>standard/färdigkopplad                      |
| Larghezza minima dell'anello adesivo<br>Minsta bredd hos fästningen                       | 0,7 cm   | 0,7 cm                               | 0,7 cm  | 0,7 cm  | 0,7 cm  | 0,7 cm   |
| Superficie totale (minima, per ogni elettrodo)<br>Total area (minimum för varje elektrod) | 148 cm <sup>2</sup>  | 136 cm <sup>2</sup>                  | 148 cm <sup>2</sup>   | 75 cm <sup>2</sup>                                    | 75 cm <sup>2</sup>  | 148 cm <sup>2</sup>  |
| Area attiva (minima, per ogni elettrodo)<br>Aktiv area (minimum för varje elektrod)       | 95 cm <sup>2</sup>   | 94 cm <sup>2</sup>                   | 95 cm <sup>2</sup>  | 40 cm <sup>2</sup>                                    | 40 cm <sup>2</sup>  | 95 cm <sup>2</sup>   |
| N. di scariche sopportate dall'elettrodo<br>Antal urladdningar som elektroden tål         | 50 @ 360 J   | 50 @ 360 J                           | 50 @ 360 J  | 50 @ 100 J  | 50 @ 100 J  | 50 @ 360 J   |
| Gel elettroconduttivo<br>Elektriskt ledande gel   | Gel adesivo conduttivo a bassa impedenza<br>Häftande, ledande gel med låg impedans   |                                      |   |   |   |  |
| Materiale conduttivo<br>Konduktivt material   | Lamina di metallo<br>Metallaminat  |                                      |   |   |   |  |
| Materiale di supporto<br>Stödjande material   | FOAM medicale<br>Medicinskt SKUM   |                                      |   |   |   |  |
| Connessione<br>Anslutning   | Connettore antishock di sicurezza o a clip, a seconda dei modelli<br>Säkerhets antichock- eller clipsanslutning, beroende på modell  |                                      |   |   |   |  |
| Lunghezza del cavo<br>Kabellängd  | Vedi lista di compatibilità nelle pagine seguenti<br>Se kompatibilitetslista på följande sidor   |                                      |   |   |   |  |
| Compatibilità<br>Kompatibilitet   | Vedi lista di compatibilità nelle pagine seguenti<br>Se kompatibilitetslista på följande sidor   |                                      |   |   |   |  |
| Tempo max di monitoraggio ECG<br>Maximal tid för EKG-övervakning                          | 24 timmar  |                                      |   |   |   |  |
| Conformità alle normative<br>Compliance to regulations                                    | Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb.<br>Direktiv 93/42/EEC och tillägg. Klass IIb medicinteknisk apparat.<br>ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-10. |                                      |   |   |   |  |

## CONFEZIONAMENTO - FÖRPACKNING

|  |   |
|--|---|
| Confezionamento primario<br>Enhetsförpackning    | 1 coppia in busta di polietilene e alluminio termosaldada con preincisione laser e tacca di apertura facilitata<br>1 par i en försluten påse tillverkad av polyetylen och aluminium, med lasernaggad skåra för enkel öppning  |
| Confezione di vendita<br>Försäljningsförpackning | 10 coppie in scatola di cartone (5 coppie per la serie "Pediatriche")<br>10 par i en låda av wellpapp (5 par för modellerna "Barn")   |
| Temperatura operativa<br>Användningstemperatur   | Compresa tra 0°C e +50°C<br>Mellan 0°C och +50°C  |
| Immagazzinamento<br>Lagring                      | Conservare in luogo asciutto, con temperatura compresa tra +5°C e +35°C.<br>Gli elettrodi confezionati possono essere esposti a temperature estreme, da -30°C a +65°C, per un massimo di 7 giorni.<br>Una conservazione prolungata e/o ripetuta a temperature estreme riduce la vita residua del prodotto.<br>Lagras torrt vid en temperatur mellan +5°C och +35°C.<br>Förpackade elektroder kan utsättas för extrema temperaturer från -30°C till +65°C i upp till 7 dagar. Långvarig eller upprepade lagring vid extrema temperaturer förkortar den återstående hållbarhetstiden hos produkten. |
| Vita utile<br>Hållbarhetstid                     | 30 mesi dalla data di produzione<br>30 månader efter produktionsdatum   |
| Scadenza<br>Utgångsdatum                         | Riportata sulla confezione<br>Anges på förpackningen  |

COMPOSIZIONE DEL REF  
REFERENSNYCKEL

REF    F    7    9    50    W

9 : Standard

7 : elettrodo e cavo radiotrasparenti  
*Röntgentransparent elektrod och kabel*

50→98 : serie  
serie

- : adulti-vuxen

W : adulti preconnettibili- vuxen färdigkopplad

P : pediatriche- barn

PW : pediatriche preconnettibili  
*barn, färdigkopplad*

PL : pediatriche ad energia ridotta  
*barn, reducerad energi*

WPL: preconnettibili, pediatriche, ad energia ridotta  
*barn, färdigkopplad, reducerad energi*

U : adulti/pediatriche- vuxen/barn


UW : adulti/pediatriche preconnettibili  
*vuxen/barn färdigkopplad*

Non tutte le combinazioni sono disponibili. Verificare l'effettiva disponibilità nelle pagine seguenti.  
*Alla kombinationer är inte möjliga. Verifiera aktuell tillgänglighet på nedanstående sidor.*


ESEMPI DI ALCUNI MODELLI – EXEMPEL PÅ NÅGRA MODELLER



**F7953**  
Serie ADULTI STANDARD  
Serien VUXEN STANDARD

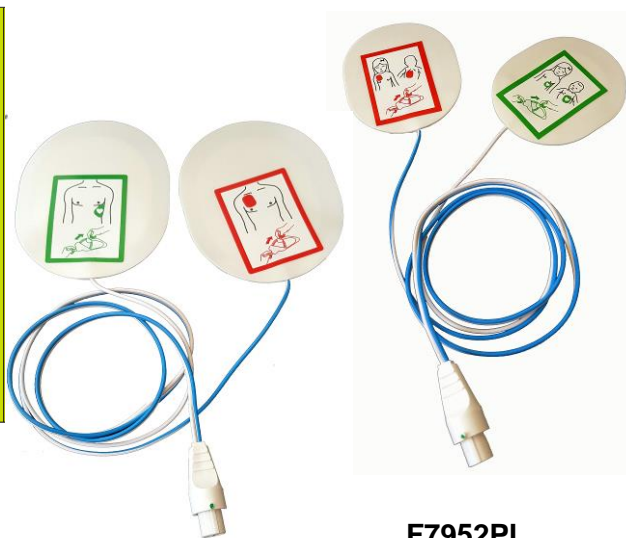

**F7953P**  
Serie PEDIATRICHE STANDARD  
Serien BARN STANDARD

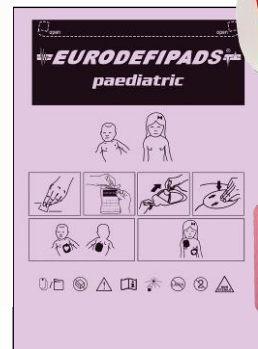


**F7952PL**  
Serie PEDIATRICHE CON RIDUTTORE DI ENERGIA  
Serien BARN REDUCERAD ENERGI



**F7750**  
Serie ADULTI RADIOTRASPARENTE  
Serien VUXEN RÖNTGENTRASPARENT



**F7955W**  
Serie ADULTI CAVO FUORI BUSTA  
Serien VUXEN FÄRDIGKOPPLAD

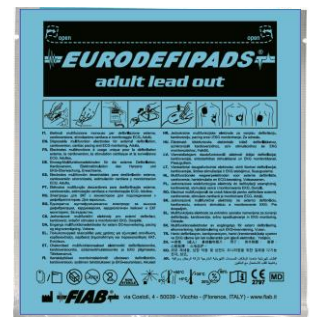

**LISTA DI COMPATIBILITA' - KOMPABILITETSLISTA**

| Marca defibrillatore<br>Defibrillatorfabrikat | Modello - Modell   | Serie - Serie |        |       |        |                       |                        |         |          |                       |        |         | Connettore<br>Anslutning                                |
|---|--|---------------|--------|-------|--------|-----------------------|------------------------|---------|----------|-----------------------|--------|---------|---|
|   |  | F7950         | F7950W | F7750 | F7750W | F7950P <sup>(1)</sup> | F7950PW <sup>(1)</sup> | F7950PL | F7950WPL | F7750P <sup>(1)</sup> | F7950U | F7950UW |   |
|   | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm):                                 | 120           | 120    | 100   | 100    | 120                   | 120                    | 120     | 120      | 100                   | 120    | 120     |   |
| <b>PHILIPS</b>                                | Heartstream ForeRunner AED (E, S, EM)                                      | ●             | ●      | ●     | ●      | -                     | -                      | -       | -        | -                     | -      | -       | <p>F7950 F7950W F7750</p> <p>F7950P F7950PL F7950PW</p> |
|   | HeartStart FR AED (940010XX, 940020XX, 940030XX)                           | ●             | ●      | ●     | ●      | -                     | -                      | -       | -        | -                     | -      | -       |   |
|   | Heartstream/HeartStart FR2 AED (M3840A, M3841A), FR2+ AED (M3860A, M3861A) | ●             | ●      | ●     | ●      | -                     | -                      | ●       | ●        | -                     | ●      | ●       |   |
|   | HeartStart FR3 AED (ECG 861389, Text 861388) *                             | ●             | ●      | ●     | ●      | -                     | -                      | -       | -        | -                     | ●      | ●       |   |
|   | CodeMaster 100 (M2475B), XE (M1724A), XL (M1723A/B), XL+ (M1722A/B)        | ●             | ●      | ●     | ●      | ●                     | ●                      | -       | -        | ●                     | -      | -       |   |
|   | HeartStart 4000 (M5500B) ***   | ●             | ●      | ●     | ●      | ●                     | ●                      | -       | -        | ●                     | -      | -       |   |
|   | Heartstream/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) ***                       | ●             | ●      | ●     | ●      | ●                     | ●                      | -       | -        | ●                     | ●      | ●       |   |
|   | HeartStart MRx (M3535A, M3536A) ***  | ●             | ●      | ●     | ●      | ●                     | ●                      | -       | -        | ●                     | ●      | ●       |   |
|   | HeartStart XL+ (861290) ***  | ●             | ●      | ●     | ●      | ●                     | ●                      | -       | -        | ●                     | ●      | ●       |   |
|   | Efficia DFM100 (866199) ***  | ●             | ●      | ●     | ●      | ●                     | ●                      | -       | -        | ●                     | ●      | ●       |   |
| HeartStart Intrepid                           | ●  | ●             | ●      | ●     | ●      | ●                     | -                      | -       | ●        | ●                     | ●      |         |   |

F7950PL, F7950WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente // reducerad energi: defibrillatororns utenergi på150 J reduceras till 50 J



F7950U, F7950UW: Non usare in modalità AED per pazienti di peso < 25kg con defibrillatori monitor HeartStart MRx / XL -

F7950U, F7950UW: Använd inte i AED mode för patienter som väger <25 kg med HeartStart MRx / XL monitorer/defibrillatorer -

\* Gli elettrodi sono compatibili con l'apparecchio per la terapia, ma non possono essere lasciati connessi all'FR3 in modalità standby o spento a causa dell'attività di autodiagnostica dell'apparecchio / Elektrodena fungerar med apparaten för terapi, men kan inte lämnas anslutna medan FR3 är i standby mode eller är avstängd beroende på självtestfunktionen hos apparaten

\*\* con cavo elettrodi a mani libere M1750A/B o M2472A e adattatore 05-10200 / med hands-free kablar M1750A/B eller M2472A och adapter 05-10200

\*\*\* con cavo elettrodi a mani libere M3508A / med hands-free kablar M3508A

|  |   | F7951 | F7951/300 | F7951W | F7751 | F7751W | F7951P | F7951PW | F7751P | F7751PW |   |  |
|--|---|-------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|---|--|
| Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |   | 120   | 300       | 120    | 100   | 100    | 120    | 120     | 100    | 100     |   |  |
| <b>Zoll Medical Corp</b>                   | PD 1200, PD 1400, PD 1600, PD 1700, PD 2000 | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      | ●       |   |  |
|  | E Series                                    | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      | ●       |   |  |
|  | M Series - M Series CCT                     | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      | ●       |   |  |
|  | R Series                                    | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      | ●       |   |  |
|  | X Series                                    | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      | ●       |   |  |
|  | Propaq MD                                   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      | ●       |   |  |
| <b>M&amp;B</b>                             | AED 7000                                    | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | -      | -       | -      | -       |   |  |

|  |  | F7952 | F7952/200 | F7952W | F7752 | F7752W | F7952P(1) | F7952PW(1) | F7952PL | F7952WPL | F7752P(1) | F7752PW(1) |
|--|--|-------|-----------|--------|-------|--------|-----------|------------|---------|----------|-----------|------------|
| Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |  | 120   | 200       | 120    | 100   | 100    | 120       | 120        | 120     | 120      | 100       | 100        |
| <b>Physio-Control</b>                      | LIFEPAK 9 con/with QUICK-COMBO ADAPTER                   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | LIFEPAK 10   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | LIFEPAK 12   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | LIFEPAK 15   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | LIFEPAK 20   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | LIFEPAK 20E  | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | LIFEPAK 500 AED con presa grigia-with grey socket        | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | -         | -          | -       | -        | -         | -          |
|  | LIFEPAK 500 AED Biphasic con presa rosa-with pink socket | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | -         | -          | ●       | ●        | -         | -          |
|  | LIFEPAK 1000 AED   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | -         | -          | ●       | ●        | -         | -          |
|  | LIFEPAK CR PLUS AED                                      | -     | -         | ●      | -     | ●      | -         | -          | ●       | ●        | -         | -          |
| LIFEPAK EXPRESS AED                        | -  | -     | ●         | -      | ●     | -      | -         | ●          | ●       | -        | -         |            |
| <b>Bexen Cardio</b>                        | REANIBEX-200   | ●     | ●         | ●      | (*)   | (*)    | -         | -          | -       | -        | -         | -          |
|  | REANIBEX-300   | ●     | ●         | ●      | (*)   | (*)    | -         | -          | -       | -        | -         | -          |
|  | REANIBEX-500   | ●     | ●         | ●      | (*)   | (*)    | -         | -          | -       | -        | -         | -          |
|  | REANIBEX-700   | ●     | ●         | ●      | (*)   | (*)    | ●         | ●          | -       | -        | (*)       | (*)        |
|  | REANIBEX-800   | ●     | ●         | ●      | (*)   | (*)    | ●         | ●          | -       | -        | (*)       | (*)        |
| <b>Cardioline Comen</b>                    | ELIFE 700  | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | S8   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
| <b>Mindray</b>                             | BENEHEART D1 (Public / Pro)                              | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | BENEHEART D3   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | BENEHEART D6   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |
|  | BENEHEART S&C series #                                   | ●     | ●         | ●      | ●     | ●      | ●         | ●          | -       | -        | ●         | ●          |



F7952 F7952W F7752  
F7752W F7952P F7952PW  
F7752P F7752PW



F7952PL F7952WPL

F7952PL, F7952WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente - *reducerad energi: defibrillatorns utenergi på 200 J reduceras till 50 J på patienten*

(\*) Non per stimolazione -- *Ej lämplig för stimulering/pacing*

# Senza riconoscimento automatico del tipo di paziente -- *Utan automatisk avkänning av patienttyp*


|  |   | F7953 | F7953W | F7753 | F7753W | F7953P | F7953PW | F7753P |
|--|---|-------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|
| Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm):     |   | 120   | 120    | 100   | 100    | 120    | 120     | 100    |
| <b>Agilent Hewlett Packard Laerdal Medical</b> | CodeMaster 100 (M2475B), XE (M1724A), XL (M1723A/B), XL+ (M1722A/B) * | ●     | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|  | HeartStart 4000 (M5500B) **   | ●     | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|  | Heartstream/HeartStart XL (M4735A), XLT (M3500B) **                   | ●     | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |




\* con cavo elettrodi a mani libere M1750A/B o M2472A *med hands-free kablarna M1750A/B eller M2472A*



\*\* con cavo elettrodi a mani libere M3507A / *med hands-free kablarna M3507A*


|                 |                       | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |        |       |        |        |
|-----------------|-----------------------|--|--------|-------|--------|--------|
|                 |                       | F7954                                      | F7954W | F7754 | F7954P | F7754P |
| <b>Schiller</b> | FRED                  | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      |
|                 | FRED TELE             | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      |
|                 | DEFIGARD DG 1002      | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      |
|                 | DEFIGARD DG 3002      | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      |
|                 | DEFIGARD DG 2000 EDOS | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      |
| <b>Esaote</b>   | MDF SAED              | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      |
|                 | MDF II                | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      |



|                       |  | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |        |       |        |        |         |        |
|-----------------------|--|--|--------|-------|--------|--------|---------|--------|
|                       |  | F7955                                      | F7955W | F7755 | F7755W | F7955P | F7955PW | F7755P |
| <b>Nihon Kohden</b>   | Cardiolife TEC-2200 series <b>con cavo-med kabel JC-755V</b>                                 | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | Cardiolife TEC-5500 series <b>con cavo- med kabel JC-755V</b>                                | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | Cardiolife TEC-5600 series <b>con cavo- med kabel K342A (JC-855V)</b>                        | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | Cardiolife TEC-7531 <b>con cavo- med kabel JC-755V</b>                                       | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | Cardiolife TEC-7600 series <b>con cavo- med kabel JC-755V</b>                                | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | Cardiolife TEC-7700 series <b>con cavo- med kabel JC-755V</b>                                | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | Cardiolife TEC-8251 <b>con cavo- med kabel JC-755V</b>                                       | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | Cardiolife TEC-8300 series <b>con cavo- med kabel K342A (JC-855V)</b>                        | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
| <b>Welch Allyn</b>    | AED-10 (Adattatore pediatrico- <i>adapter för barn</i> Welch Allyn 002173-U <sup>(2)</sup> ) | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | AED-20 (Adattatore pediatrico- <i>adapter för barn</i> Welch Allyn 002174-U <sup>(2)</sup> ) | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | PIC-30, PIC-40, PIC-50   | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
| <b>Artema Innomed</b> | CARDIOAID 360B   | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | CARDIOAID 200B   | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | CARDIOAID 200  | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | CARDIOAID 100  | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | CARDIOAID XL+  | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | CARDIOAID XL   | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
| <b>Artema S&amp;W</b> | CARDIO AID LS  | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | CARDIO AID MC  | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | CARDIO AID MC+   | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
| <b>Dräger</b>         | CARDIOLOG 2000   | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
| <b>MRL</b>            | LITE   | ●  | ●      | ●     | ●      | ●      | ●       | ●      |
|                       | LIFEQUEST  | ●  | ●      | ●     | ●      | -      | -       | -      |




|                 |                     | F7956                                      | F7956W | F7756 | F7956P | F7956PW | F7756P |   |  |     |     |     |     |  |  |
|-----------------|---------------------|--|--------|-------|--------|---------|--------|---|--|-----|-----|-----|-----|--|--|
|                 |                     | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |        |       |        |         |        | 200   | 200  | 100 | 200 | 200 | 100 |  |  |
| <b>Schiller</b> | FRED EASY (1G – 2G) | ●  | ●      | ●     | ●      | ●       | ●      | <br>F7956<br>F7956W<br>F7756 | <br>F7956P<br>F7956PW<br>F7756P |     |     |     |     |  |  |
|                 | FRED EASY LIFE      | ●  | ●      | ●     | ●      | ●       | ●      |   |  |     |     |     |     |  |  |
|                 | DEFIGARD DG 4000    | ●  | ●      | ●     | ●      | ●       | ●      |   |  |     |     |     |     |  |  |
|                 | DEFIGARD DG 5000    | ●  | ●      | ●     | ●      | ●       | ●      |   |  |     |     |     |     |  |  |
|                 | DEFIGARD DG 6002    | ●  | ●      | ●     | ●      | ●       | ●      |   |  |     |     |     |     |  |  |

|                        |   |  |  | F7957W | F7957PL |     |     |   |  |
|------------------------|---|--|--|--------|---------|-----|-----|---|--|
|                        |   | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |  |        |         | 120 | 120 |   |  |
| <b>Cardiac Science</b> | POWERHEART AED - 9200 series                            |  |  |        |         | ●   | ●   |  |  |
|                        | POWERHEART AED G3 - 9300 series (G3 / G3 PLUS / G3 PRO) |  |  |        |         | ●   | ●   |   |  |
|                        | FIRSTSAVE AED G3 9300 series                            |  |  |        |         | ●   | ●   |   |  |
| <b>Ge</b>              | RESPONDER AED   |  |  |        |         | ●   | ●   |   |  |
|                        | RESPONDER AED PRO                                       |  |  |        |         | ●   | ●   |   |  |

**F7957W:** Per questo modello la vita del prodotto è 18 mesi dalla data di produzione – För den här modellen är hållbarheten 18 månader från tillverkningsdatum

**F7957PL:** riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente - reducerad energi: defibrillatorns utenergi på 200 J reduceras till 50 J på patienten

|                                |   | F7958                                      | F7958W | F7958P(1) | F7958PW | F7958PL |   |     |     |     |     |  |  |
|--------------------------------|---|--|--------|-----------|---------|---------|---|-----|-----|-----|-----|--|--|
|                                |   | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |        |           |         |         | 120   | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| <b>CU Medical Systems, inc</b> | PARAMEDIC CU-ER1                              | ●  | ●      | -         | -       | ●       |  |     |     |     |     |  |  |
|                                | PARAMEDIC CU-ER2, CU-ER3                      | ●  | ●      | ●         | ●       | -       |   |     |     |     |     |  |  |
|                                | PARAMEDIC CU-ER5 con cavo-med kabel ER-5 OA03 | ●  | ●      | ●         | ●       | -       |   |     |     |     |     |  |  |
|                                | LIFEGAIN CU-HD1                               | ●  | ●      | ●         | ●       | -       |   |     |     |     |     |  |  |

**F7958PL:** riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente- reducerad energi: defibrillatorns utenergi på 150 J reduceras till 50 J på patienten

|  |                | F7959                                    | F7959W | F7759 | F7959P(1) | F7959PL | F7959WPL |  |  |
|--|----------------|--|--------|-------|-----------|---------|----------|--|--|
|  |                | Lunghezza del cavo (cm) kabellängd (cm): |        |       |           |         |          |  |  |
| <b>CU Medical Systems, inc</b>                               | I – PAD NF1200 | ●  | ●      | ●     | -         | ●       | ●        |  |  |
| <b>Cmos Drake</b>  | FUTURA         | ●  | ●      | ●     | ●         | -       | -        |  |  |
| <b>Amoul®<br/>AMBULANC<br/>(SHENZHEN)<br/>TECH. CO., LTD</b> | i3             | -  | ●      | -     | -         | -       | ●        |  |  |

F7959PL, F7959WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 200J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente-- reducerad energi: defibrillatorns utenergi på 200 J reduceras till 50 J på patienten

|                        |   | F7960W                                   | F7760W |  |
|------------------------|---|--|--------|--|
|                        |   | Lunghezza del cavo (cm) kabellängd (cm): |        |  |
| <b>Metrax Primedic</b> | HEARTSAVE AED (fino a-upp till s/n 73944xxxxxx)   | ●  | ●      |  |
|                        | HEARTSAVE AED-M (fino a-upp till s/n 73945xxxxxx) | ●  | ●      |  |
|                        | HEARTSAVE 6 (fino a-upp till s/n 73946xxxxxx)     | ●  | ●      |  |
|                        | HEARTSAVE 6S (fino a-upp till s/n 73947xxxxxx)    | ●  | ●      |  |
|                        | DEFIMONITOR XD                                    | ●  | ●      |  |

|                     |   | F7961U                                     | F7961UW | F7961UWXL | F7761 | F7961P | F7961PW |  |  |
|---------------------|---|--|---------|-----------|-------|--------|---------|--|--|
|                     |   | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |         |           |       |        |         |  |  |
| <b>Nihon Kohden</b> | Cardiolife TEC-2200 series <b>con cavo- med kabel JC-765V</b>         | ●  | ●       | ●         | ●     | ●      | ●       |  |  |
|                     | Cardiolife TEC-5500 series <b>con cavo- med kabel JC-765V</b>         | ●  | ●       | ●         | ●     | ●      | ●       |  |  |
|                     | Cardiolife TEC-5600 series <b>con cavo- med kabel K342B (JC-865V)</b> | ●  | ●       | ●         | ●     | ●      | ●       |  |  |
|                     | Cardiolife TEC-7531 <b>con cavo- med kabel JC-765V</b>                | ●  | ●       | ●         | ●     | ●      | ●       |  |  |
|                     | Cardiolife TEC-7600 series <b>con cavo- med kabel JC-765V</b>         | ●  | ●       | ●         | ●     | ●      | ●       |  |  |
|                     | Cardiolife TEC-7700 series <b>con cavo- med kabel JC-765V</b>         | ●  | ●       | ●         | ●     | ●      | ●       |  |  |
|                     | Cardiolife TEC-8300 series <b>con cavo- med kabel K342B (JC-865V)</b> | ●  | ●       | ●         | ●     | ●      | ●       |  |  |

|                     |  | F7962                                      | F7762       | F7962P          |  |
|---------------------|--|--|-------------|-----------------|--|
|                     |  | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |             |                 |  |
| <b>Marquette GE</b> | MARQUETTE 1250 FIRST RESPONDER                                   | ●  | ●           | ●               |  |
|                     | MARQUETTE 1500 FIRST RESPONDER                                   | ●  | ●           | ●               |  |
|                     | MARQUETTE RESPONDER 2000 (con cavo adattatore- med adapterkabel) | ●  | ●           | ●               |  |
|                     | MARQUETTE RESPONDER 3000 (con cavo adattatore- med adapterkabel) | ●  | ●           | ●               |  |
| <b>Esaote</b>       | MDF  | ●  | ●           | ●               |  |
|                     | MDF PLUS   | ●  | ●           | ●               |  |
|                     |  | Lunghezza del cavo (cm) kabellängd (cm):   |             |                 |  |
| <b>Nihon Kohden</b> | TEC-8250 con cavo- med kabel L200                                |  |             | F7963<br>●      |  |
|                     | TEC-8251 con cavo- med kabel L200                                |  |             | ●               |  |
|                     |  | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |             |                 |  |
| <b>Weinmann</b>     | MEDUCORE EASY  |  | F7964W<br>● | F7964PW(1)<br>- |  |
|                     | MEDUCORE STANDARD  |  | ●           | ●               |  |
|                     |  | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |             |                 |  |
| <b>Corpuls</b>      | CORPULS 3 (P/N 04300)  | F7965/PLUS<br>●<br>                        | F7965<br>●  | F7965P<br>●     |  |

Gli elettrodi non sono compatibili nel caso CORPULS 3 dotato del modular system Defibrillator-/Pacerunit **SLIM** (P/N 04301)

Elektrodena är inte kompatibla om CORPULS 3 är försedd med det modulära systemet Defibrillator-/Pacerunit **SLIM** (P/N 04301)

|                  |                             | F7966W                                     | F7966WPL |  |  |
|------------------|-----------------------------|--|----------|--|--|
|                  |                             | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |          |  |  |
| <b>Defibtech</b> | DDU – 100 Lifeline AED      | ●  | ●        |  |  |
|                  | DDU – 120 Lifeline AUTO AED | ●  | ●        |  |  |


F7966WPL: riduzione di energia erogata al paziente: 150J sul defibrillatore diventano 50J sul paziente-- *reducerad energi: defibrillatorns utenergi på 150 J reduceras till 50 J på patienten*

|                 |                                   | F7967                                      | F7967W | F7967P | F7967PW |  |                                      |
|-----------------|-----------------------------------|--|--------|--------|---------|--|--------------------------------------|
|                 |                                   | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |        |        |         |  |                                      |
| <b>Schiller</b> | FRED PA-1                         | ●  | ●      | ●      | ●       |  | F7967<br>F7967W<br>F7967P<br>F7967PW |
|                 | FRED easyport, FRED easyport plus | ●  | ●      | ●      | ●       |  |                                      |
|                 | DEFIGARD HD-7, DEFIGARD Touch 7   | ●  | ●      | ●      | ●       |  |                                      |
|                 | ARGUS PRO LifeCare 1 & 2          | ●  | ●      | ●      | ●       |  |                                      |
| <b>PHILIPS</b>  | CARDIOVIT AT-101 Easy             | ●  | ●      | ●      | ●       |  |                                      |
|                 | TEMPUS LS                         | ●  | ●      | -      | -       |  |                                      |


Gli elettrodi sono senza RFID per il riconoscimento automatico della scadenza (funzionalità presente su FRED PA-1 e DEFIGARD TOUCH 7)  
*Elektrodena levereras utan RFID-systemet för automatisk igenkänning av utgångsdatum (funktioner tillgängliga på FRED PA-1 och DEFIGARD TOUCH 7)*

|                |                 | F7969W                                     | F7969PW |  |  |
|----------------|-----------------|--|---------|--|--|
|                |                 | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): |         |  |  |
| <b>Mediana</b> | HeartOn AED A10 | ●  | ●       |  |  |

|           |  | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): | F7981 | F7981P |
|-----------|--|--|-------|--------|
| <b>GE</b> | RESPONDER 3000 (attacco diretto- <i>direktanslutning</i> ) |  | ●     | ●      |
|           | RESPONDER 2000 (attacco diretto- <i>direktanslutning</i> ) |  | ●     | ●      |
|           | RESPONDER 1100 (attacco diretto- <i>direktanslutning</i> ) |  | ●     | ●      |
|           | CARDIOSERV (attacco diretto- <i>direktanslutning</i> )     |  | ●     | ●      |
|           | DASH RESPONDER (attacco diretto- <i>direktanslutning</i> ) |  | ●     | ●      |




|                  |                 | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): | F7986 | F7986W | F7986P | F7986PW | F7986UW | F7986UW-D700 | F7786UW-D700 |
|------------------|-----------------|--|-------|--------|--------|---------|---------|--------------|--------------|
| <b>Mediana</b>   | D500            |  | ●     | ●      | ●      | ●       | -       | -            | -            |
|                  | HEARTON AED A15 |  | -     | -      | -      | -       | ●       | -            | -            |
|                  | D700            |  | -     | -      | -      | -       | -       | ●            | ●            |
| <b>Tecno-Gaz</b> | TECNOHEART PLUS |  | -     | -      | -      | -       | ●       | -            | -            |



F7986 - F7986W - F7986P - F7986PW - F7986UW-D700 - F7786UW-D700 : Non commercializzabili in Italia – Säljs inte i Italien

|                          |              | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): | F7987W | F7987PW |
|--------------------------|--------------|--|--------|---------|
| <b>Zoll Medical Corp</b> | AED PLUS     |  | ●      | ●       |
|                          | AED PRO      |  | ●      | ●       |
|                          | ZOLL AED 3   |  | ●      | ●       |
|                          | R Series (#) |  | ●      | ●       |
|                          | X Series (*) |  | ●      | ●       |



**F7987W-F7987PW:** senza funzione CPR (risposta alle compressioni e metronomo) - *utan CPR funktion (återkoppling på kompression och taktmetronom)*

#) Usato con Cavo multifunzionale terapeutico CPR-D-REF 8000-000863 o adattatore Ref 8009-0020 – *Används med "Multifunction therapy cable CPR-D-REF 8000-000863" eller adapter*

(\*) Ref 8009-0020 Usato con Cavo multifunzionale terapeutico CPR-D-REF 8300-000831o adattatore Ref 8009-0020 – Används med “Multifunction therapy cable CPR-D-REF 8300-000831” eller adapter Ref 8009-0020


|                     |                      |  |     |                |  |
|---------------------|----------------------|--|-----|----------------|--|
|                     |                      | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): | 120 | <b>F7989UW</b> |  |
| <b>Nihon Kohden</b> | Cardiolife AED 2100K |  | ●   |                |  |
|                     | Cardiolife AED 2150K |  | ●   |                |  |
|                     | Cardiolife AED 2151K |  | ●   |                |  |
|                     | Cardiolife AED 2152K |  | ●   |                |  |

Non commercializzabile in Francia, Germania, Gran Bretagna - Säljs inte i Frankrike, Tyskland eller Storbritannien.

|               |                           |  |     |               |  |
|---------------|---------------------------|--|-----|---------------|--|
|               |                           | Lunghezza del cavo (cm) / kabellängd (cm): | 120 | <b>F7992U</b> |  |
| <b>Radian</b> | Heart Guardian AED HR-501 |  | ●   |               |  |




|                        |   |              |               |  |
|------------------------|---|--------------|---------------|--|
|                        |   | <b>F7970</b> | <b>F7970P</b> |  |
| <b>Laerdal Medical</b> | CAVI-CABLES LAERDAL MEDICAL<br>REF. 945004 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori–supplied, e.g., medföljer t. ex. följande defibrillatorer: MRx, FR (serie-serie), XL)<br>REF. 920601 – REF. 920602 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori– medföljer t. ex. följande defibrillatorer: HeartStart3000)<br>REF. 920620 (fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori– medföljer t. ex. följande defibrillatorer: HeartStart911) | ●            | ●             |  |

|                       |  |              |  |
|-----------------------|--|--------------|--|
|                       |  | <b>F7971</b> |  |
| <b>Physio-Control</b> | CAVI-CABLES Physio-Control REF 3011030-00 (11110-000052) e-och REF 3011030-01 (11110-000053)<br>(fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori– medföljer t. ex. följande defibrillatorer: HeartStart911) | ●            |  |

|                     |  | F7972 | F7972P |   |
|---------------------|--|-------|--------|---|
| <b>Marquette GE</b> | CAVO-CABLE GE MEDICAL SYSTEMS REF. 22338301<br>(fornito, ad esempio, con i seguenti defibrillatori - <i>medföljer t. ex. följande defibrillatorer</i> : GE CARDIOSERV, ESAOTE MDF) | •     | •      |  |
| <b>Esaote</b>       |  |       |        |   |

- (<sup>1</sup>) Non utilizzare con i defibrillatori totalmente automatici (AED); la funzione pediatrica e/o l'energia erogata devono essere impostate manualmente, secondo le modalità del defibrillatore specifico.  
*Använd inte tillsammans med helautomatiska defibrillatorer (AED); pediatrik användning och/eller avgiven energi måste ställas in manuellt enligt instruktionerna hos den specifika defibrillatorn.*
- (<sup>2</sup>) Nelle applicazioni pediatriche, l'utilizzo degli elettrodi senza l'adattatore riduttore di energia indicato può risultare pericoloso.  
*Vid användning på barn kan användandet av elektroderna utan den angivna energireduceringsadaptorn vara farligt.*

OLTRE AI MODELLI EURODEFIPADS DI CUI SOPRA, SONO DISPONIBILI ALTRI MODELLI DI ELETTRODI DESTINATI ALLA SOLA STIMOLAZIONE CARDIACA  
BESIDES EURODEFIPADS MODELS, ADDITIONAL ELECTRODES HAVE BEEN INTENDED FOR EXTERNAL CARDIAC STIMULATION

|                          |   | F7951/STIM                                  | F7951P/STIM |   |
|--------------------------|---|---|-------------|---|
|                          |   | Lunghezza del cavo (cm) // kabellängd (cm): |             |   |
|                          |   | 120   | 120         |   |
| <b>Zoll Medical Corp</b> | ZOLL serie M (solo versioni con stimolatore)<br>M SERIES (endast versioner med stimulering) | ●   | ●           |  |
|                          |   | F7955/STIM                                  |             |   |
|                          |   | Lunghezza del cavo (cm) // kabellängd (cm): |             |   |
|                          |   | 120   |             |   |
| <b>Nihon Kohden</b>      | TEC-7731 con cavo- med kabel JC-755V  | ●   |             |  |
|                          | TEC-5531 con cavo- med kabel JC-755V  | ●   |             |   |
| <b>Innomed</b>           | CARDIOAID 200B  | ●   |             |   |
|                          |   | F7973                                       |             |   |
| <b>Physio-Control</b>    | CAVO-KABEL Physio-Control REF. 802905-03  | ●   |             |  |

FIAB garantisce la compatibilità degli elettrodi con i modelli di defibrillatori sopra indicati; si raccomanda comunque di verificare preventivamente la compatibilità con il dispositivo in uso, controllando almeno il corretto inserimento del connettore nella presa dell'apparecchio, del cavo paziente o di adattatori eventualmente utilizzati. Ove non specificato diversamente, l'utilizzo di adattatori o cavi di estensione potrebbe compromettere la funzionalità degli elettrodi. Seguire le indicazioni dei produttori dei defibrillatori per quanto riguarda il posizionamento e la terapia, specialmente su pazienti pediatrici. I marchi e i nomi commerciali presenti nel documento sono proprietà dei rispettivi produttori.

FIAB garanterar kompatibiliteten hos elektroderna med de ovan nämnda apparaterna/defibrillatormodellerna. Det rekommenderas hur som helst att kompatibiliteten hos elektroderna kontrolleras i förväg med den använda apparaten, speciellt med hänsyn till anslutningen av apparaten, patientkabeln eller använda adaptrar. Om inte annat angivits kan användandet av adaptrar och förlängningskablar äventyra funktionen hos elektroderna. Följ defibrillatortillverkarens instruktioner beträffande placering och terapi, speciellt när det gäller användning på barn. Varumärken och kommersiella namn i detta dokument ägs av respektive tillverkare.

Svensk representant:

**Blue Grass**

Bluegrass AB  
Biblioteksgatan 4b  
435 30 Mölnlycke  
[www.bluegrass.se](http://www.bluegrass.se)  
031 – 703 79 70