

Flow-Safe II EZ[®] CPAP system

Med inbyggd manometer*, övertrycksventil och nebulisator

Produktinformation

- Integrerad tryckmanometer* för kontinuerlig mätning av PEEP trycket, 0 – 25 cmH₂O
- Integrerad läkemedelsnebulisator, en slang som driver både CPAP och nebulisator. Styrts med ett ON/OFF vred
- Övertrycksventil som öppnas vid PEEP >25 cmH₂O
- Inklusive huvudhätta och mask
- Låg syrgaskonsumtion tack vare den nya venturi ventilen
- Alla produkterna är DEHP-fria
- Enpatientmodell



Flödesinformation/PEEP

Flöde liter/min	CPAP/PEEP (cmH ₂ O) Nebulisator av	CPAP/PEEP (cmH ₂ O) Nebulisator på
6 liter/min	2,0-3,0	1,0-2,0
10 liter/min	6,0-7,0	2,0-3,0
12 liter/min	8,0-9,0	3,0-4,0
15 liter/min	11,0-12,0	4,0-5,0

CPAP/PEEP (cmH ₂ O)	Flöde liter/min Nebulisator av	Flöde liter/min Nebulisator på
5,0	8-9 liter/min	15-16 liter/min
7,5	10-12 liter/min	19-20 liter/min
10,0	13-14 liter/min	24-25 liter/min
13,0	FLUSH	28-30 liter/min



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp
10-57318	Flow-Safe II EZ [®] / Deluxe mask CPAP, vuxen Large, med manometer*, övertrycksventil, pannstöd, huvudhätta i polyester och MAX [®] nebulisator	5 st /Box
10-57319	Flow-Safe II EZ [®] / Deluxe mask CPAP, vuxen Medium, med manometer*, övertrycksventil, pannstöd, huvudhätta i polyester och MAX [®] nebulisator	5 st /Box
10-57320	Flow-Safe II EZ [®] / Deluxe mask CPAP, barn Small, med manometer*, övertrycksventil, pannstöd, huvudhätta i polyester och MAX [®] nebulisator	5 st /Box
10-57321	Flow-Safe II EZ [®] utan mask, med manometer*, övertrycksventil och MAX [®] nebulisator	5 st/Box

* Manometerns exakthet är: +/- 3 cmH₂O upp till 15 cmH₂O och +/- 5 cmH₂O över 15 cmH₂O.