

Novir InstaCLEAR drogtest för urin är ett mycket snabbt preliminärt screeningtest för förekomst av droger. Det är ett kvalitativt snabbtest som kan testa för flera substanser samtidigt. Urintesterna är översvämningssäkra och absorberar rätt mängd urin vilket ger enkla och tydliga panelsvar och minskar risk för handhavande fel. Urinstickan behöver endast doppas någon sekund och kan därefter läggas åt sidan i väntan på resultatet. Metoden gör det enklare för utföraren och sparar tid som kan användas i t.ex. dialog med patienten.

Produktegenskaper och fördelar


- Ergonomisk och användarvänlig
- Mycket snabb absorberingsförmåga
- Mycket snabba resultat
- Bevisat hög noggrannhet, sensitivitet och specificitet
- Testar för flertalet substanser samtidigt
- Anpassningsbara gränsvärden tillgängliga
- Singeltester finns tillgängligt
- Tätt förseglad, absorberar därför rätt mängd vätska
- Möjlighet till att testa för alla relevanta substanser



Bruksanvisning: Drogtester

Förberedelser: Samla urin i en ren behållare. Om urinen förvarats kallt se till att testet och urinprovet är rumstempererat (15–30 grader) före testning.

Öppna förpackningen och ta fram testet när det är dags att doppa ner det.

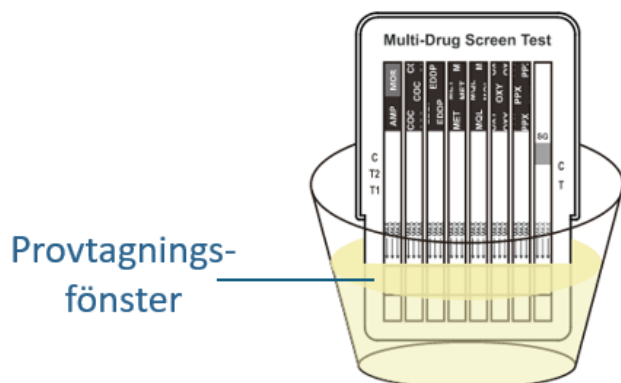


1. Ställ urinprovet framför dig och ta av det vita locket (plasthöljet) på testet.
2. Sänk ner testet, med pilarna pekandes nedåt, till markeringen "max" i minst 1 sekund (se bild). Notera att om volymen i urinprovet inte når upp till provtagningsfönstret så måste testet istället sänkas ner i minst 20 sekunder.
3. Sätt tillbaka locket på testet och lägg testet på en plan yta. Läs resultatet efter 5 minuter. Notera att testresultatet förblir stabilt i 10 minuter från utförande och bör inte tolkas efter det.

Tolkning av resultat



NEGATIVT

(-)

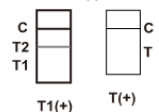

POSITIVT

(+)



OGILTIGT

Negativt resultat

Två röda eller rosa linjer syns i avläsningsfönstret, en vid "C" och en vid "T" (höger bild). Notera att vid provtagning av två substanser på samma sticka visas tre linjer, en vid "C", en vid "T1" och en tredje vid "T2" (vänster bild).

Positivt resultat

Endast ett rött streck uppstår i kontrollområdet "C" och inget streck vid område "T". Om ingen röd eller rosa linje visas bredvid "T1" - "T3" tolkas resultatet som preliminärt positivt, d.v.s. förekomst av drogen i fråga. OBS! Positiva resultat bör verifieras vid ackrediterat labb.

Ogiltigt resultat

Om ingen linje vid "C" syns så är testet ogiltigt. Detta kan bero på att otillräcklig mängd urin har sugits upp i remsan, felaktig förvaring av test, att det har gått ut eller handhavande fel. Vänligen kontakta oss så vägleder vi er.