

Novir InstaCLEAR drogtest för saliv är ett mycket snabbt preliminärt screeningtest för förekomst av droger. Det är ett kvalitativt snabbtest som kan testa för flera substanser samtidigt. Remsorna är högabsorberande och kräver mindre mängd saliv.

Novir InstaCLEAR drogtest för saliv erbjuder möjligheten att testa för alla de mest relevanta substanserna med mycket snabbt och tillförlitligt resultat.

Produktegenskaper och fördelar


- Mycket snabb absorberingsförmåga
- Kräver liten (100µl) mängd saliv; bra vid exempelvis muntorrhet
- Mycket snabba resultat
- Bevisat hög noggrannhet, sensitivitet och specificitet
- Ergonomisk och användarvänlig för provtagare
- Testar för flertalet substanser samtidigt



Bruksanvisning: Drogtester

Förberedelser: Låt testet nå rumstemperatur innan det används. Provlämnaren ska instrueras att inte föra något in i munnen 10 minuter innan testet genomförs (inklusive mat och/eller all typ av dryck).

Öppna förpackningen och ta fram testet när det är dags att användas.

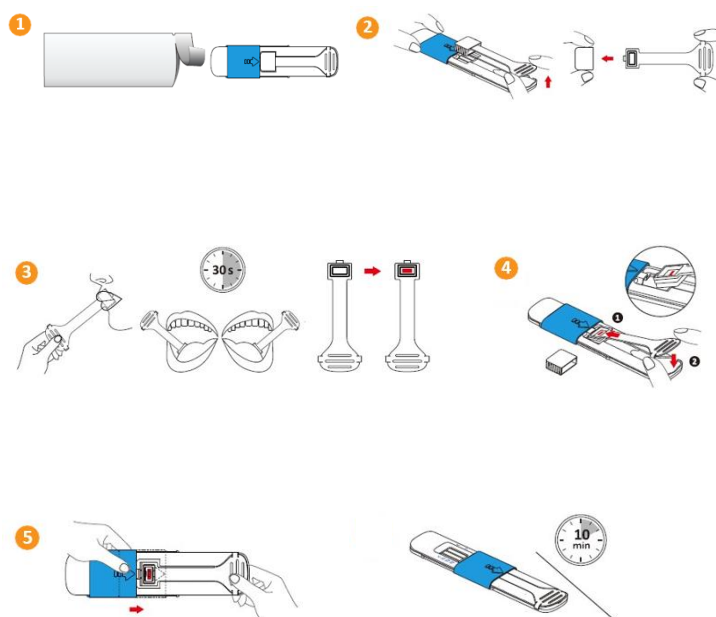

1. Ta loss teststicken från testkassetten och ta sedan bort locket från teststicken.
2. Instruera provlämnaren att placera teststicken mellan kinden och tandköttet i munnens nedre del, och gnugga försiktigt längs med både kind och tandkött tills att uppsamlingsdynan är mättad av saliv. Observera att provlämnaren inte får bita eller tugga på stickan.
3. Ta ut teststicken efter 30 sekunder. Om indikatorn är röd, sätt tillbaka teststicken i testkassetten. Om indikatorn inte är röd, sätt tillbaka teststicken i munnen för att samla mer saliv.
4. Skjut reglaget i pilens riktning tills det att reglaget går i lås.
5. Placera testkassetten på en plan yta och läs av resultatet efter 10 minuter. Observera att testresultat inte ska läsas av efter 20 minuter.

Tolkning av resultat




Negativt resultat

Två röda eller rosa linjer syns i avläsningsfönstret, en vid "C" och en vid "T" (höger bild). Notera att vid provtagning av tre substanser på samma sticka visas fyra linjer, en vid "C", en vid "T1", "T2" och en fjärde vid "T3" (vänster bild).



Positivt resultat

Endast ett rött streck uppstår i kontrollområdet "C" och inget streck vid område "T". Om ingen röd eller rosa linje visas bredvid "T1" - "T3" tolkas resultatet som preliminärt positivt, d.v.s. förekomst av drogen i fråga. OBS! Positiva resultat bör verifieras vid ackrediterat labb.

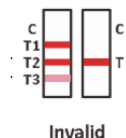

Ogiltigt resultat

Om ingen linje vid "C" syns så är testet ogiltigt. Detta kan bero på att otillräcklig mängd saliv har sugits upp i remsan, felaktig förvaring av test, att det har gått ut eller handhavande fel. Vänligen kontakta oss så vägleder vi er.