



Kiilto Pro Easydes Wipe

singlepack 150 pcs

Ytdesinfektionsservett



Kiilto Pro singelpackade ytdesinfektionsservett med tensid är avsedd för desinfektion av mindre ytor som t.ex. toalettsitsar, dörrhandtag etc. Har effekt på bakterier, jästsvamp, alla höljeförsedda virus samt vissa nakna virus som t.ex. Adenovirus och Murine Norovirus. Produkten består av ca 75 vol% denaturerad etanol samt tensid. Ersätter tidigare artikel 603062 Antibac Ytdesinfektionsservett singelpack.

Användningsområde	För desinfektion av mindre tagytor som t.ex. dörrhandtag, toalettsitsar, bord etc.
Produktegenskaper	<p>Biocidprodukt PT2, PT4 för ytor. Engångsdukar för rengöring och desinfektion av mindre ytor (1 m²) som tål alkohol som t.ex. dörrhandtag, toalettsits och andra tagytor. För professionellt bruk. Servetten är gjord av 100% viskos och duken är 19,5 x 19,5 cm.</p> <p>150 singelpackade servetter i displaykartong är idealiskt för alla typer av offentlig och institutionell användning.</p> <p>Mikrobiologisk information: EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek EN14348 (mykobactericidal effekt) 60 sek EN16615 (baktericidal & jästicidal effekt) 1 min</p>
Bruksanvisning	<p>Bearbeta ytan med desinfektionsservetten så att den är fuktig i minst 30 sekunder. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela processen för att uppnå önskad effekt..</p> <p>Om ytan är mycket smutsig rekommenderas rengöring med vanligt rengöringsmedel först.</p> <p>De enskilda servetterna är avsedda för engångsbruk.</p>
Obs	Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Förvaring	Förvaras i normal rumstemperatur. Hållbarhet öppnad: 3 år från tillverkning vid korrekt förvaring.
Utseende och doft	Oparfymrad vit servett.
Tillverkningsland	UNGERN

Förpackningsmaterial Displayförpackningen kan återvinnas som kartong.
Använd servett samt folie slängs i hushållsavfallet.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
	1 x 150 st	5265	7331964052655	7331964952658



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.