

Produktinfo

TePe® Muntork Extra Mjuk Large används för daglig munvård och för att bevara och förbättra munhälsan. Använd så ofta som behövs för att rengöra munnen, ta bort stelnad saliv och matrester. Kan användas tillsammans med vatten, TePe® Hydrating Mouth Spray Saliva Stimulating eller TePe® Lubricating Mouth Spray, för att återfukta torra och känsliga munnar. Använd enligt bruksanvisningen och enligt anvisningar från tandvårds- eller sjukvårdspersonal.

Denna muntork kan även användas för att förebygga infektioner i munnen hos patienter som har svårt att ta hand om sin munhälsa. Om möjligt kan muntorken användas för egenvård, men ska i första hand användas av vårdgivare för att hjälpa någon med munvården.

Förvaras mörkt och i rumstemperatur. Muntorken är inte steril, handtaget är gjort av ABS-plast och skummet av extra mjuk polyuretan. Innehåller 50 st.

Användarinstruktioner

För engångsbruk, får inte återanvändas. Använd inte tillsammans med vätskor som innehåller alkohol. Kan användas på barn under uppsikt av en vuxen. Använd endast på intakt munslemhinna. Ska ej användas på patienter med okontrollerat bitande eller tuggande. Muntorken får inte tuggas eller bitas på.

Instruktioner

Se till att själva torken (skummet) sitter fast på handtaget före användning. Stäng påsen mellan varje användning.

1. Patienten bör sitta halvvägs upp eller sitta upp helt, då blir det lättare att komma åt hela munnen.

2. Vid användning med vätska, låt muntorken suga upp vätskan, upprepa detta efter rengöring av halva



Egenskaper

- Används för daglig munvård och för att bevara munhälsan
- Lättar besvär av torr, känslig och irriterad munslemhinna
- Extra mjuk muntork
- Funktionell design för optimal rengöring
- Kan användas med vatten

Produkt material

Skum: Polyuretan Muntorkspinne:
ABS Plast Plastpåse: LDPE-plast
(Lågdensitetspolyeten)

munnen.
3. Om patienten har svårt att hålla munnen öppen kan ett bitstöd användas.
4. Gnid försiktigt torken mot tänderna och den mjuka munslemhinnan. Snurra torken lite för bästa resultat.

Items

| <small>2025-04-22</small> Förpackningstyp | Artikelnummer | EAN konsument | Enheter (konsumentförpackning) | Enheter (detaljhandelsförpackning) | <small>www.tepe.com</small> |
|--|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|--|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
