

## Produktinfo

TePe® Extra Mjuk Muntork Salivstimulerande används för daglig munvård och för att bevara och förbättra munhälsan. Rengör munnen, tar bort stelnad saliv och matrester.

Muntorken är förinränd i en salivstimulerande vätska med smak av mild äpple/pepparmint. Det ger en återfuktande och fräsch känsla vid torr mun och känsliga munslemhinnor. Muntorken kan användas upp till 6 gånger per dag. Konsultera med din tandläkare/vårdpersonal om andra fluorinnehållande produkter används utöver tandborstning.

Denna muntork kan även användas för att förebygga infektioner i munnen hos patienter som har svårt att ta hand om sin munhälsa. Om möjligt kan muntorken användas för egenvård, men ska i första hand användas av vårdgivare för att hjälpa någon med munvården.

Muntorken är inte steril, handtaget är gjort av ABS-plast och skummet av extra mjuk polyuretan. Innehåller 24 stycken. TePe muntorkar är CE-märkta medicintekniska produkter. Tillverkare: TePe Munhygienprodukter AB.

## Användarinstruktioner

För engångsbruk, får inte återanvändas. Kan användas på barn under uppsikt av en vuxen. Använd endast på intakt munslemhinna. Ska ej användas på patienter med okontrollerat bitande eller tuggande. Muntorken får inte tuggas eller bitas på. För 12+ år.

### Instruktioner

Se till att själva torken (skummet) sitter fast på handtaget före användning.

1. Patienten bör sitta halvvägs upp eller sitta upp helt, då blir det lättare att komma åt hela munnen.
2. Låt muntorken suga upp



## Egenskaper

- Används för daglig munvård och för att bevara munhälsan
- Lättar besvär av torr, känslig och irriterad munslemhinna
- Extra mjuk muntork
- Funktionell design för optimal rengöring
- Innehåller äppelsyra för att stimulera salivproduktionen

## Produkt material

Kartongförpackning  
Plastblister: Flerskiktade PE-film med PE/EVOH-laminat och flerskiktad PA/PE Svabb: Skum: Polyuretan  
Muntorkspinne: ABS Plast (Acrylonitril Butadien Styrene)

## Ingredients

Glycerin, Aqua, Calcium Lactate, Urea, Malic Acid, Sodium Phosphate, Xylitol, Methylparaben, Potassium Chloride, Sodium Monofluorophosphate (40 ppm F-), Aroma, Mentha Piperita Oil, Menthol, Magnesium Chloride.

vätskan  
3. Om patienten har svårt att hålla munnen öppen kan ett bitstöd användas.  
4. Gnid försiktigt torken mot tänderna och den mjuka munslemhinnan. Snurra torken lite för bästa resultat.

---

## Items

2025-05-22

<b>Förpackningstyp</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN konsument</b>	<b>Enheter (konsumentförpackning)</b>	<b>Enheter (detaljhandelsförpackning)</b>	<a href="http://www.tepe.com">www.tepe.com</a>
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---	--

---