

Produktinfo

TePe® Muntork Smörjande används för daglig munvård och för att bevara och förbättra munhälsan. Använd så ofta som behövs för att rengöra munnen, ta bort stelad saliv och matrester. Muntorken är förindränkt i solrosolja som ger en smörjande och återfuktande känsla vid torr mun och känslig munslemhinna. Oljan har inga tillsatta smaker eller tillsatser.

Denna muntork kan även användas för att förebygga infektioner i munnen hos patienter som har svårt att ta hand om sin munhälsa. Om möjligt kan muntorken användas för egenvård, men ska i första hand användas av vårdgivare för att hjälpa någon med munvården.

Muntorken är inte steril, handtaget är gjort av ABS-plast och skummet av extra mjuk polyuretan. Innehåller 24st.

TePe muntorkar är CE-märkta medicintekniska produkter. Tillverkare: TePe Munhygienprodukter AB.



Egenskaper

- Smörjande solrosolja
- Används för daglig munvård och för att bevara munhälsan
- Lättar besvär av torr, känslig och irriterad munslemhinna
- Extra mjuk muntork
- Funktionell design för optimal rengöring

Produkt material

Kartongförpackning
Plastblister:
Flerskiktade PE-film med PE/EVOH-laminat och flerskiktats PA/PE
Svabb:
Skum: Polyuretan
Muntorkspinne:
ABS Plast (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Ingredients

Helianthus Annuus Hybrid Oil.

Användarinstruktioner

För engångsbruk, får inte återanvändas. Kan användas på barn under uppsikt av en vuxen. Använd endast på intakt munslemhinna. Ska ej användas på patienter med okontrollerat bitande eller tuggande. Muntorken får inte tuggas eller bitas på.

Instruktioner

Se till att själva torken (skummet) sitter fast på handtaget före användning.

1. Patienten bör sitta halvvägs upp eller sitta upp helt, då blir det lättare att komma åt hela munnen.
2. Låt muntorken suga upp vätskan
3. Om patienten har svårt att hålla munnen öppen kan ett bitstöd användas.
4. Gnid försiktigt torken mot tänderna och den mjuka munslemhinnan. Snurra torken lite för bästa resultat.

Items

2025-05-22

Förpackningstyp	Artikelnummer	EAN konsument	Enheter (konsumentförpackning)	Enheter (detaljhandelsförpackning)	www.tepe.com
-----------------	---------------	---------------	--------------------------------	------------------------------------	--
