

## Värmejacka non-woven, lång ärm Personalkläder med muddar



### Ingående delar/material

|                 |  | Färg    |
|-----------------|--|---------|
| <b>Tyg:</b>     | 100% SS, spunbond non-woven av polypropylen (PP) 40 g/m <sup>2</sup> | Mörkblå |
| <b>Krage:</b>   | Terylen. Bredd 40 mm   | Vit     |
| <b>Mudd:</b>    | Terylen. Bredd 80 mm   | Vit     |
| <b>Knappar:</b> | Polypropylen (PP)  | Vit     |

Produkten innehåller inte PVC.  
Storlekmarkering visas på etikett i nacken

### Förpackningar

Innerförpackning IFP  
Transportförpackning TFP

### Material

PE-påse  
kartong

### Avfallshantering\*

mjukplast  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

### Beskrivning

Värmejacka av polypropylen-nonwoven material med stickade muddar och krage. Jackan har fem vita knappar framtill och en ficka på vardera sida.

Jackan är biologiskt utvärderade enligt ISO 10993 och godkänd i test avseende fibersläpp enligt EN ISO 13795-1:2019 för operationskläder och draperingsmaterial.

### Indikation

Jackan används för att hålla medicinsk personal varm på sjukhus och sjukvårdsinrättningar.

### Avsedda användare:

Medicinsk personal, vårdpersonal, laboratoriepersonal och besökare.

| Art.nr. | Stl. | Längd bak<br>cm | Bröstvidd<br>cm (Ø) | Ärmlängd<br>cm* | St/IFP | St/TFP     | MBA |
|---------|------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|------------|-----|
| 4400    | S    | 68              | 55 (110)            | 65              | 5      | 5 x 5 = 25 | TFP |
| 4410    | M    | 73              | 60 (120)            | 67,5            | 5      | 5 x 5 = 25 | TFP |
| 4420    | L    | 78              | 65 (130)            | 70              | 5      | 5 x 5 = 25 | TFP |
| 4430    | XL   | 83              | 70 (140)            | 72,5            | 5      | 5 x 5 = 25 | TFP |
| 4440    | XXL  | 88              | 75 (150)            | 75              | 5      | 5 x 5 = 25 | TFP |

\*Mätt från axel till mudd.

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Bruksanvisning

1. Öppna innerförpackningen.
2. Jackans framsida kan öppnas helt med hjälp av tryckknappar.
3. Jackan är avsedd att användas utanpå normal arbetsdräkt.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.






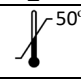

### Varning:

- Endast för engångsbruk
- Får inte användas i närheten av eld



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

|   |  |
|---|--|
|    | Medicinteknisk produkt   |
|    | CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I  |
|   | Denna produkt är avsedd för engångsbruk.<br>Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten |
|  | Osteril produkt  |
|  | Förvaras torrt   |
|  | Utsätt inte för direkt solljus   |
|  | Temperaturgränser (min +5°C till +50°C)  |
|  | Använd inte produkten om förpackningen är skadad.  |

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

|   |   |
|---|---|
|  | Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart |
|  | Produkten innehåller inte naturlatex            |

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



**Manufacturer:**  
Ningbo Transo-medical Co., Ltd  
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza  
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District  
Ningbo 315021, China

**Importer:**  
AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

**EC REP EC-REP:**  
Caretechion GmbH  
Niederrheinstr. 71  
40474 Düsseldorf  
Germany