

DuoDERM® E Border

Beskrivning: DuoDERM® E Border-förbanden består av Convatecs unika hydrokolloidteknologi (natriumkarboximetylcellulosa, gelatin, pektin och polymerer), ett ytskikt av polyuretanskum och en extra häftkant som ger god vidhäftning.

Indikation: Använd DuoDERM® E Border för behandling av lätt till måttligt vätskande sår.

- **Svårläkta sår:** trycksår och bensår
- **Akuta sår:** mindre brännskador, tagställen för transplantat, övriga kirurgiska och traumatiska sår.

Applicering: Förbandet ska täcka 3 cm utanför sårkanten. Ta bort skyddsfilm, rulla förbandet varsamt över såret och tryck det försiktigt på plats. Vik sedan tillbaka kanterna och ta bort skyddspappret från kanten och tryck försiktigt på plats. Förbandet ska bytas när det är kliniskt indicerat eller efter högst 7 dagar.



Produkt	Storlek/volym	Antal/Fpk	CvT-nr
DuoDERM® E Border	10 x 10 cm	5 st	187970
DuoDERM® E Border	14 x 14 cm	5 st	187971
DuoDERM® E Border Sacral	15 x 18 cm	5 st	187973
DuoDERM® E Border Sacral	20 x 23 cm	5 st	187974

DuoDERM® Extra tunn

Beskrivning: DuoDERM® Extra tunn-förband är ett sterilt, tunt, formbart och flexibelt hydrokolloidförband som bygger på Convatecs unika hydrokolloidsammansättning. Förbandet består av natriumkarboximetylcellulosa, gelatin, pektin och vidhäftande polymer. DuoDERM® Extra tunn-förbandet absorberar, skapar en fuktig miljö som främjar läkning genom att stödja autolytisk debridering och underlättar epitelcellsvandringen. DuoDERM® Extra tunn är enkelt att applicera, kan klippas till och är mycket lämpligt för områden som kan vara svåra att lägga om. DuoDERM® Extra tunn-förband är utformat för att minimera risken för ytterligare nedbrytning av huden och för att förhindra friktion mot huden. Förbandets yta är utformad för att röra sig naturligt med huden.

Indikationer: DuoDERM® Extra tunn är avsett för hantering av torra till lätt vätskande sår.

- **Akuta sår:** mindre brännskador, skrubbsår, lacerationer och postoperativa sår
- **Svårläkta sår:** trycksår kategori 1-2, lätt vätskande bensår
- **Dermatologi:** enbart eller i kombination med steroider vid behandling av psoriasis och andra tillstånd där läkaren rekommenderar ocklusionsbehandling.

Applicering: Välj en storlek som är 3 cm längre ut än sårkanten. Rulla förbandet varsamt över såret och tryck det lätt på plats.

DuoDERM® Extra tunn-förbandet kan användas som ytterförband tillsammans med Aquacel® Extra™-förbandet för måttligt till kraftigt vätskande och blödande sår och i kombination med Aquacel® Ag Extra™ för infekterade sår eller sår med hög infektionsrisk. Förbandet ska bytas när det är kliniskt indicerat eller efter högst 7 dagar.



Produkt	Storlek/volym	Antal/Fpk	CvT-nr
DuoDERM® Extra Thin Oval	10 x 15 cm	5 st	651008
DuoDERM® Extra Thin	7,5 x 7,5 cm	5 st	187951
DuoDERM® Extra Thin	10 x 10 cm	5 st	187954
DuoDERM® Extra Thin	10 x 10 cm	20 st	401807
DuoDERM® Extra Thin	15 x 15 cm	5 st	187956
DuoDERM® Extra Thin	5 x 10 cm	10 st	187959
DuoDERM® Extra Thin	5 x 20 cm	10 st	187961
DuoDERM® Extra Thin Post-op	9 x 15 cm	10 st	187920
DuoDERM® Extra Thin Post-op	9 x 25 cm	10 st	187921
DuoDERM® Extra Thin Post-op	9 x 35 cm	10 st	187922