

# Förband för lätt vätskande och blödande sår till torra sår

## DuoDERM® Hydrogel

**Beskrivning:** DuoDERM® Hydrogel är en klar, viskös hydrogel utan konserveringsmedel som innehåller hydrokolloider (pektin och natriumkarboximetylcellulosa) och propylenglykol. DuoDERM® Hydrogel ger en vätske-/fuktbalans i såret, antingen genom att absorbera eller avge vätska. En fuktig miljö stöder autolytisk debridering av fibrinbeläggning och nekrotisk vävnad.

**Indikation:** DuoDERM® Hydrogel är särskilt utformad och indikerad för hantering av torra och nekrotiska sår med fibrin och nekrotisk vävnad. Den kan användas på både ytliga och djupa sår.

**Användning:** Använd det medföljande sterila munstycket för enkel och exakt applicering direkt i såret upp till kanten mot den omkringliggande huden och täck med ett lämpligt fuktbevarande förband som DuoDERM®-förband. Vid nekrotiska sår och fibrinbelagda sår kan DuoDERM Hydrogel få vara kvar kvar i upp till 3 dagar. På sår med ren och granulerande vävnad kan gelen få sitta kvar i upp till 7 dagar.



Produkt	Storlek/volym	Antal/Fpk	CvT-nr
DuoDERM® Hydrogel	Tub med 15 g	10 st	401802

## DuoDERM® E

**Beskrivning:** DuoDERM® E är sterila, häftande hydrokolloida fuktighetsbevarande förband. Vid kontakt med fuktig såryta bildar Convatecs unika hydrokolloida formulering (natriumkarboximetylcellulosa, gelatin, pektin och häftande polymerer) en gel som bidrar till fuktig sårhäkning, underlättar autolytisk debridering och främjar granulation.

**Indikation:** DuoDERM® E är avsedda för behandling av lätt till måttligt vätskande sår

- **Svårläkta sår:** trycksår, bensår
- **Akuta sår:** mindre brännskador, tagställen för transplantat, övriga kirurgiska och traumatiska sår.

**Applicering:** Välj en storlek så att förbandet sträcker sig minst 3 cm utanför sårkanten. Rulla förbandet varligt över såret och tryck försiktigt fast det så att det fäster ordentligt. Förbandet är lätt att ta bort och skadar inte nybildad vävnad när det tas bort. Förbandet ska bytas när det är kliniskt indicerat eller efter högst 7 dagar.



Produkt	Storlek/volym	Antal/Fpk	CvT-nr
DuoDERM® E	10 x 10 cm	5 st	187660
DuoDERM® E	10 x 10 cm	20 st	187658
DuoDERM® E	15 x 20 cm	10 st	187631
DuoDERM® E	20 x 20 cm	3 st	187663
DuoDERM® E	20 x 30 cm	3 st	187642

## DuoDERM® E Border

**Beskrivning:** DuoDERM® E Border-förbanden består av Convatecs unika hydrokolloidteknologi (natriumkarboximetylcellulosa, gelatin, pektin och polymerer), ett ytskikt av polyuretanskum och en extra häftkant som ger god vidhäftning.

**Indikation:** Använd DuoDERM® E Border för behandling av lätt till måttligt vätskande sår.

- **Svårläkta sår:** trycksår och bensår
- **Akuta sår:** mindre brännskador, tagställen för transplantat, övriga kirurgiska och traumatiska sår.

**Applicering:** Förbandet ska täcka 3 cm utanför sårkanten. Ta bort skyddsfilmerna, rulla förbandet varsamt över såret och tryck det försiktigt på plats. Vik sedan tillbaka kanterna och ta bort skyddspappret från kanten och tryck försiktigt på plats. Förbandet ska bytas när det är kliniskt indicerat eller efter högst 7 dagar.



Produkt	Storlek/volym	Antal/Fpk	CvT-nr
DuoDERM® E Border	10 x 10 cm	5 st	187970
DuoDERM® E Border	14 x 14 cm	5 st	187971
DuoDERM® E Border Sacral	15 x 18 cm	5 st	187973
DuoDERM® E Border Sacral	20 x 23 cm	5 st	187974

## DuoDERM® Extra tunn

**Beskrivning:** DuoDERM® Extra tunn-förband är ett sterilt, tunt, formbart och flexibelt hydrokolloidförband som bygger på Convatecs unika hydrokolloidsammansättning. Förbandet består av natriumkarboximetylcellulosa, gelatin, pektin och vidhäftande polymer. DuoDERM® Extra tunn-förbandet absorberar, skapar en fuktig miljö som främjar läkning genom att stödja autolytisk debridering och underlättar epitelcellsvandringen. DuoDERM® Extra tunn är enkelt att applicera, kan klippas till och är mycket lämpligt för områden som kan vara svåra att lägga om. DuoDERM® Extra tunn-förband är utformat för att minimera risken för ytterligare nedbrytning av huden och för att förhindra friktion mot huden. Förbandets yta är utformad för att röra sig naturligt med huden.

**Indikationer:** DuoDERM® Extra tunn är avsett för hantering av torra till lätt vätskande sår.

- **Akuta sår:** mindre brännskador, skrubbsår, lacerationer och postoperativa sår
- **Svårläkta sår:** trycksår kategori 1-2, lätt vätskande bensår
- **Dermatologi:** enbart eller i kombination med steroider vid behandling av psoriasis och andra tillstånd där läkaren rekommenderar ocklusionsbehandling.

**Applicering:** Välj en storlek som är 3 cm längre ut än sårkanten. Rulla förbandet varsamt över såret och tryck det lätt på plats.

DuoDERM® Extra tunn-förbandet kan användas som ytterförband tillsammans med Aquacel® Extra™-förbandet för måttligt till kraftigt vätskande och blödande sår och i kombination med Aquacel® Ag Extra™ för infekterade sår eller sår med hög infektionsrisk. Förbandet ska bytas när det är kliniskt indicerat eller efter högst 7 dagar.



Produkt	Storlek/volym	Antal/Fpk	CvT-nr
DuoDERM® Extra Thin Oval	10 x 15 cm	5 st	651008
DuoDERM® Extra Thin	7,5 x 7,5 cm	5 st	187951
DuoDERM® Extra Thin	10 x 10 cm	5 st	187954
DuoDERM® Extra Thin	10 x 10 cm	20 st	401807
DuoDERM® Extra Thin	15 x 15 cm	5 st	187956
DuoDERM® Extra Thin	5 x 10 cm	10 st	187959
DuoDERM® Extra Thin	5 x 20 cm	10 st	187961
DuoDERM® Extra Thin Post-op	9 x 15 cm	10 st	187920
DuoDERM® Extra Thin Post-op	9 x 25 cm	10 st	187921
DuoDERM® Extra Thin Post-op	9 x 35 cm	10 st	187922

## DuoDERM® Signal™

**Beskrivning:** DuoDERM® Signal™-förbandet är ett sterilt, tunt, formbart och flexibelt hydrokolloidförband som bygger på Convatecs unika hydrokolloidteknologi. Förbandet har avfasade kanter och en innovativ visuell bytesindikator. Förbandet består av natriumkarboximetylcellulosa, gelatin, pektin och vidhäftande polymer. DuoDERM® Signal™-förbandet absorberar, skapar en fuktig miljö som främjar läkning genom att stödja autolytisk debridering och underlättar epitelcellsvandringen. DuoDERM® Signal™-förbandet är enkelt att applicera. Det är utformat för att minimera risken för ytterligare nedbrytning av huden och för att förhindra friktion mot kläder och sängkläder. Det har en slät yta som är en fördel vid lägesförändring/vändningsscheman.

**Indikationer:** DuoDERM® Signal™-förbandet är avsett för behandling av lätt till måttligt vätskande sår.

- **Akuta sår:** mindre brännskador, skrubbsår, lacerationer och postoperativa sår
- **Svårläkta sår:** trycksår kategori 1-2, lätt vätskande bensår
- **Dermatologi:** enbart eller i kombination med steroider vid behandling av psoriasis och andra tillstånd där läkaren rekommenderar ocklusionsbehandling.

**Applicering:** Välj en storlek som är 3 cm längre ut än sårkanten. Placera förbandet direkt över sårets mitt, fixera det korrekt och tryck försiktigt fast det.

DuoDERM® Signal™-förbandet kan användas som ytterförband i kombination med Aquacel® Extra™-förbandet för måttligt till kraftigt vätskande och blödande sår samt i kombination med Aquacel® Ag Extra™/ Aquacel® Ag+ Extra™ för infekteradesår eller sår med hög infektionsrisk. Förbandet ska bytas när det är kliniskt indicerat eller efter högst 7 dagar.



Produkt	Storlek/volym	Antal/Fpk	CvT-nr
DuoDERM® Signal™	10 x 10 cm	5 st	403326
DuoDERM® Signal™	14 x 14 cm	5 st	403327
DuoDERM® Signal™	20 x 20 cm	5 st	403328
DuoDERM® Signal™ Häl	18,5 x 19,5 cm	5 st	410500
DuoDERM® Signal™ Sacral	20 x 22,5 cm	5 st	410501