

PRODUKTFAKTABLAD

TENA PANTS DISCREET



Användningsområde

TENA Pants Discreet är ett säkert, bekvämt och diskret byxskydd för mindre till medelstora urinläckage och är mycket lämpligt för uppegående vårdtagare. Finns i två storlekar, Medium och Large. Skyddet tas enkelt av och på som vanliga underkläder, vilket ger användaren större möjlighet att klara sig själv samt ökar känslan av välbefinnande och oberoende.



Sidosömmar som går att riva

Ytskiktet FeelDry kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Benelastik/läckagebarriär för god och säker passform



Mjuka, elastiska andningsbara material för hög användarkomfort

Diskret våtindikator

Odour Control™ minskar risken för oönskad lukt



PRODUKTFAKTABLAD TENA PANTS DISCREET

Produktegenskaper

TENA Pants Discreet är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med FeelDry ytskiktet gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Benelastik/läckagebarriär för god och säker passform. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa.

TENA Pants Discreet är ett mycket bekvämt och hudvänligt skydd. Den elastiska midjeresären och det bomullsmjuka stretchtyget ger en kroppsnära passform vilket gör produkten mycket bekväm och säker under hela användningstiden. Andningsbara material och en luftig anatomisk design som gör att produkten täcker en mindre del av kroppen, gör skyddet bekvämt att ha på sig och främjar en god hudhälsa. Produkten har andningsbart spärrskikt.

TENA Pants Discreet är ett mycket diskret skydd. Den kroppsnära passformen förhindrar att skyddet syns utanpå kläder och det bomullsliknande materialet gör skyddet prasselfritt.


TENA Pants Discreet har Odour Control™ som minskar risken för oönskad lukt.



3023 0023

TENA Pants											
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Midja/ höft cm	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Ben- öppning cm	Antal/ påse st	Antal/ kart st	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Praktisk absorption	Essity Art.nr
Discreet											
Medium	✓	75-100	69	65	48	45-65	12	72	790	263	79 57 32
Large	✓	95-125	69	73	51	50-70	10	60	763	254	79 57 33

Användarinstruktion

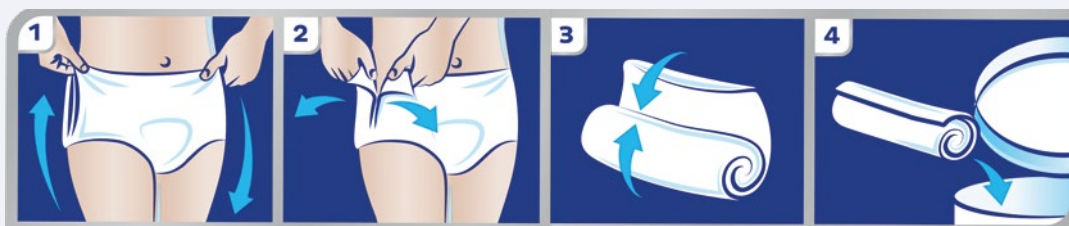

PRODUKTFAKTABLAD TENA PANTS DISCREET

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA, Övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORBTIONSKÄRNA, Undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt neutralisera oönskad lukt

HÖFT- OCH MIDJEELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kropps nära passform

BEN – OCH BARRIÄRELASTIK

Material: Syntestiska polyisoprentrådar

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

SPÄRRSKIKT

Material: Polypropen, andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

För samtliga TENA Pants skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



essity

TENA,
an Essity brand

